

Actieve Stalift 2620

Snelstartgids



Deze snelstartgids helpt met de functionele aspecten van de actieve tillift maar is geen vervanging voor het lezen en begrijpen van de gebruikershandleiding. Vergewis u ervan dat de te tillen persoon geschikt is voor het gebruik van een actieve tillift.

Bediening

De tillift wordt bediend door de druktoetsen op de handbediening of via het bedieningsklavier op de bedieningskast.



Hefarm omhoog



Hefarm omlaag



Onderstel dicht





Onderstel open



Led - toestel aan/uit




Led - batterijspanning

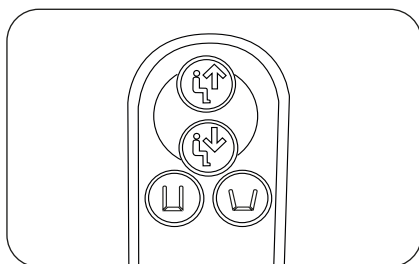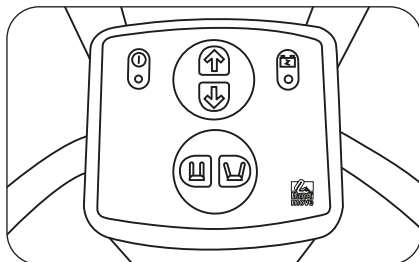

De tillift operationeel maken

Om de tillift aan te schakelen drukt u de groene knop op de bedieningskast in, om hem uit te schakelen de rode knop. De rode knop doet tegelijkertijd dienst als **noodschakelaar**. Wanneer de tillift niet werkt controleer eerst of de rode knop niet is ingedrukt.

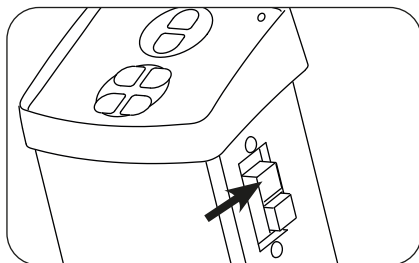

De batterijkast plaatsen

Bij de plaatsing van de batterijkast moet u er goed op letten dat het geleidingsblokje aan de achterzijde van de batterijkast in de geleidingsgleuf schuift en dat de batterijkast over de positioneerpenen wordt geplaatst.


Laden van de batterijen

Laad de batterijen dagelijks op. De automatische lader maakt overladen onmogelijk.

Opladen kan ofwel via een wandlader (A) ofwel kan u rechtstreeks de lader aansluiten op de batterijkast (B) en op het net (230 V).


Het verklikkerlichtje van de lader geeft volgende functies weer:

- Oranje/geel : batterijen worden geladen
- Groen : batterijen zijn volledig opgeladen

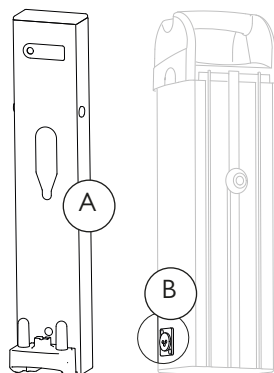

OPMERKING

ALS DE LIFT EEN GELUIDSSIGNAAL GEEFT, OF DE BATTERIJ-LED OP HET BEDIENINGSKLAVIER LICHT OP, DAN MOETEN DE BATTERIJEN DRINGEND WORDEN OPGELADEN.

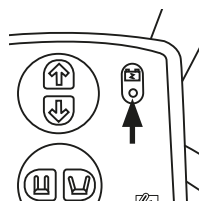


LET OP!

GEBRUIK DE LIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

Nooddaling

Duw de rode nooddalingsknop recht naar boven en blijf duwen tot het zitvlak van de gebruiker op de gewenste plaats is.

De nooddaling werkt enkel wanneer de hefarm belast is, dus wanneer er een patiënt in de lift hangt.

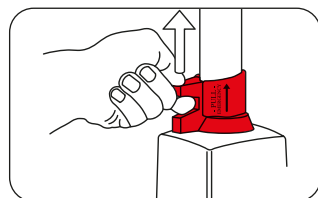

Gebruik Actieve Tillift

- Vergewis u ervan dat de actieve tillift het juiste hulpmiddel is voor de gebruiker.
- Ga na of de actieve tillift voldoende opgeladen is.
- Informeer de gebruiker over de transfer.
- Zet de rolstoel op rem (indien nodig).

stap 1. Plaats de tildoek op de rug van de gebruiker zodat de klittenband ter hoogte van de lenden komt.

stap 2. Plaats het verstevigde deel om de romp heen. De armen van de gebruiker blijven steeds aan de buitenkant van de tildoek.




stap 3. Sluit de klittenband.

stap 4. Breng de lift naar de gebruiker toe. Let op voor eventuele obstakels zodat de voeten op de voetenplank kunnen worden geplaatst. Open indien nodig het onderstel zodat er voldoende ruimte is om dicht bij de gebruiker te komen.


stap 5. Plaats de voeten van de gebruiker volledig op de voetenplank (indien mogelijk kan de gebruiker hiermee helpen). Breng de lift naar de gebruiker totdat het scheenbeen de beensteun raakt.

stap 6. Maak de benen aan de beensteun vast door gebruik te maken van de kuitband en span eventueel aan. Zorg ervoor dat de benen contact maken met de beensteun.

stap 7. Laat de gebruiker de gebruikershendel vastnemen, (één hand aan elke zijde). Verwijs hiervoor eventueel naar de donker grijze kleur van de gebruikershendel. De armen blijven altijd aan de buitenzijde van de tildoek!

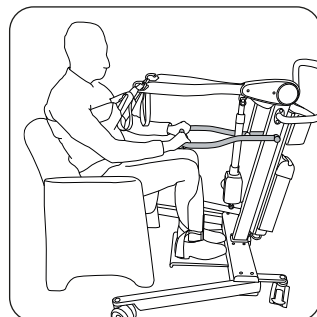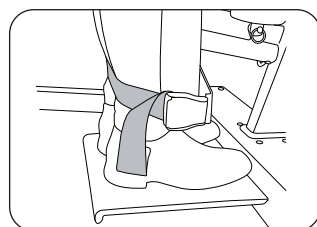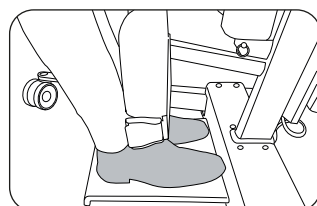


stap 8. Bevestig de lussen van de tildoek aan de hefarm. Wanneer u een gebruiker voor de eerste maal tilt, raden wij u aan de kortere lussen te gebruiken met de hefarm in de laagste positie. Zorg er wel voor dat de persoon niet te hoog wordt getild en de voeten steeds op de voetenplank blijven.

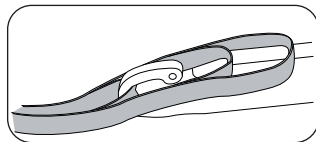

stap 9. Laat de hefarm 10 à 20 cm omhoog komen. Ga na of de lussen vastgemaakt zijn aan de hefarm en of dit aan beide zijden dezelfde lus is.

stap 10. Ga verder met tillen. Blijf steeds naast de gebruiker staan tijdens de tilbeweging en vraag de gebruiker om zoveel mogelijk mee te helpen met de opwaartse beweging. Zorg er wel voor dat de persoon niet te hoog wordt getild en de voeten steeds op de voetenplank blijven. De houding van de gebruiker hangend of rechtstaand is afhankelijk van de taak of transfer die wordt uitgevoerd en de voorkeur van de gebruiker.

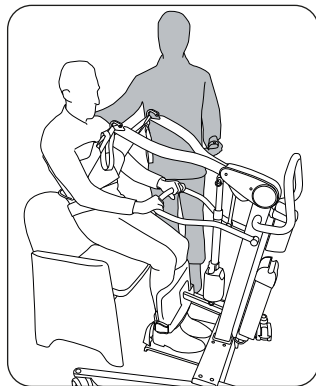

LET OP!

Bij EVENTUEEL VERSCHUIVEN VAN DE VOETEN DIENT DE BEWEGING ONMIDDELIJK WORDEN STOPGEZET.

Tildoek

Bij gebruik zorg ervoor dat de armen van de te tillen persoon zich aan de buitenkant van de tildoek bevinden (tildoek onder de oksels).

Sluit de klittenband wanneer het tildoek niet wordt gebruikt & tijdens het wassen.

Controleer voor ieder gebruik op mogelijke slijtage/schade/uitrafeling. Bij het vaststellen van slijtage/schade, de tildoek direct buiten gebruik stellen en vervangen.



Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove - België
Tel + 32 54 31 97 10
info@handimove.com
www.handimove.com