

HANDI-MOVE MODEL 2610

MOBIELE TILLIFT VICTOR MET KANTELJUK

HANDLEIDING

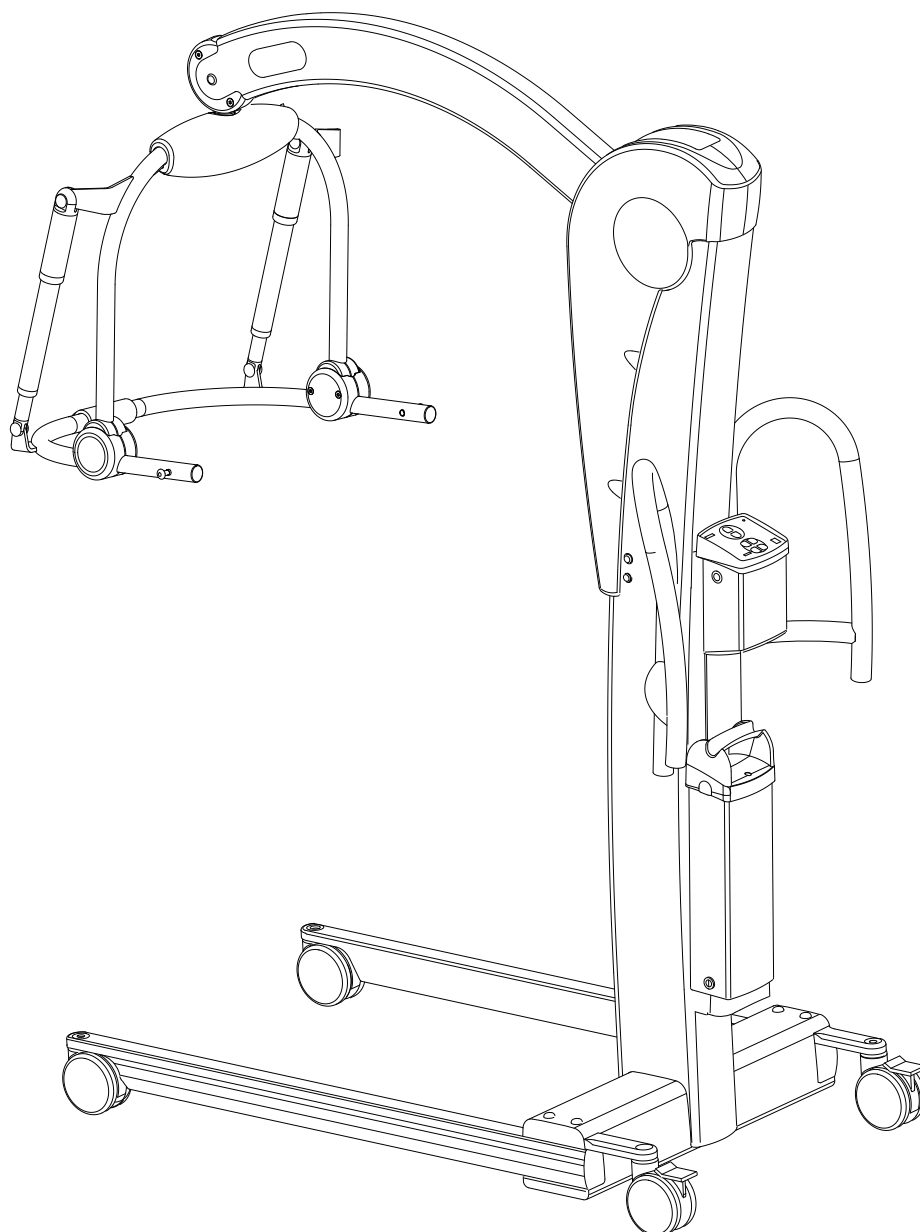

Lees deze handleiding grondig voor gebruik.
Laat uw tilsysteem jaarlijks inspecteren. Zie deze handleiding voor meer informatie.
De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Inhoud

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Toepassingsgebied	5
3.	Productinformatie	6
4.	Montagevoorschriften.....	7
5.	Verklaring van de symbolen	9
5.1.	Symbolen op het typeplaatje en verpakking	9
5.2.	Typeplaatje & verpakkingslabel.....	10
6.	Werking.....	11
6.1.	Bediening	11
6.2.	De tillift operationeel maken	11
6.3.	Batterijkast	11
6.4.	Mechanische nooddaling.....	12
6.5.	Laden van de batterijen	12
6.6.	Verplaatsen en tillen	13
7.	Reinigen, opbergen en verwijderen.....	14
7.1.	Het toestel reinigen	14
7.2.	Het toestel opbergen.....	14
7.3.	Verwijderen bij einde levensduur.....	14
8.	Inspectie	15
8.1.	Inspectie voor elk gebruik.....	15
8.2.	Jaarlijkse inspectie	15
9.	Problemen oplossen	16
10.	Technische specificaties	17
10.1.	Technische specificaties mobiele tillift Victor	17
10.2.	Technische specificaties kanteljuk	20
11.	Onderdelenlijst.....	21
12.	Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie	22
13.	Garantie	23
14.	EG-verklaring van overeenstemming.....	24


1. Veiligheidsvoorschriften

- Alvorens het toestel te gebruiken, vergewis u ervan dat:
 - De gebruiker/begeleider de gepaste instructie en training heeft gekregen.
 - De begeleider ten allen tijde volledige aandacht schenkt aan de gebruiker.
 - Deze gebruiksinstructies aandachtig werden doorgenomen en begrepen.
 - Het toestel enkel gebruikt wordt met Handi-Move artikelen of door Handi-Move goedgekeurde artikelen.
- De maximum toegelaten belasting kan verschillend zijn tussen tillift, tiljuk en tildoeck. Hier geldt dan de laagst toegelaten belasting als maximum toegelaten belasting.
- Gebruik het toestel niet wanneer het gebreken vertoont (zie hoofdstuk 8).
- Indien er onderlinge elektromagnetische invloed wordt uitgeoefend tussen dit toestel en een ander toestel, mogen deze toestellen niet samen gebruikt worden.
- De gebruikstemperatuur moet tussen -10°C en +40°C liggen. De luchtvochtigheid moet tussen de 30% en 70% liggen.
- De Mobiele tillift Victor met Kanteljuk niet sneller voortbewegen dan de normale stapnelheid.



LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE TILLIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUOPENING STOOT.

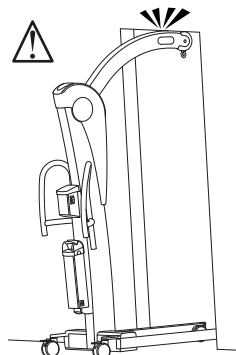


BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG EN ZO DICHT MOGELIJK BIJ ELKAAR TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.

GEBRUIK DE LIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

DE TILLIFT NOOIT ZIJDELIJNS BELASTEN, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, **NOOIT** TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT.

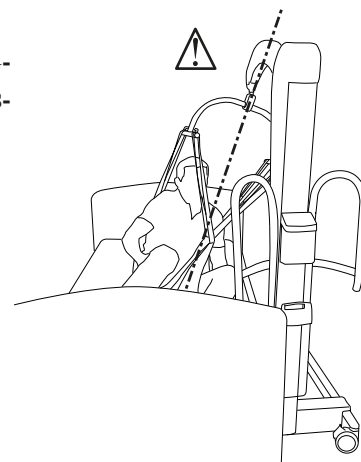

GEBRUIK DE TILLIFT NOOIT OP OPPERVLAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.

GEBRUIK DE LIFT NIET ONDER STROMEND WATER.

DE MAGNETEN IN DE HANDBEDIENING KUNNEN DE WERKING VAN PACEMAKERS EN GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN BEÏNVOEDEN. WANNEER DE AFSTAND TUSSEN DE HANDBEDIENING EN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN) GROTER IS DAN 10 CM IS ER GEEN INVLOED MEER VAN DE MAGNETEN OP DE WERKING VAN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN). CONTACTEER UW ARTS INDIEN U HIEROVER MEER INFORMATIE WENST.

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet door de gebruiker en/of patiënt worden gemeld aan de fabrikant. In de Europese Unie moet elk ernstig voorval steeds gemeld worden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

2. Toepassingsgebied







De Victor tillift wordt gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, geriatische centra, verzorgingstehuizen, dagcentra en privéwoningen, om hulpbehoevenden of personen met bewegingsstoornissen te transfereren. Zodoende wordt overbelasting bij verzorgers, door het dragen van te zware lasten, vermeden en een verbeterde mobiliteit aan personen met een handicap gegarandeerd. Transfers gebeuren van of naar een bed, ligstoel, rolstoel, bad, toilet, grondoppervlak, verzorgingstafel enz... om hulpbehoevenden of personen met bewegingsstoornissen te transferen. Zodoende wordt overbelasting bij verzorgers, door het dragen van te zware lasten, vermeden en een verbeterde mobiliteit aan personen met een handicap gegarandeerd.

Het kanteljuk dient om gebruikers van een zit- naar lighouding te brengen, en omgekeerd.

3. Productinformatie

In deze handleiding wordt verwezen naar de volgende onderdelen van uw Victor:

- A Onderstel
- B Mast
- C Hefarm
- D Kanteljuk
- E Handbediening
- F Achterwiel met rem
- G Voorwiel zonder rem
- H Bedieningskast
- I Nooddaling
- J Hoofd/Noodschakelaar
- K Connector handbediening
- L Bedieningsklavier
- M Batterijkast
- N Zekering batterijkast
- O Connector voor lader
- P Stuurhendel
- Q Positioneerpennen
- R Geleidingsblok
- S Geleidingsgleuf
- T Wandlader (optie)
- U Actuators kanteljuk
- V Ophangpunten tildoeck

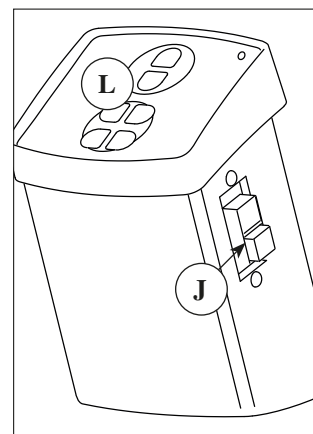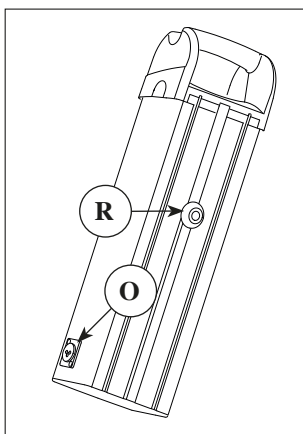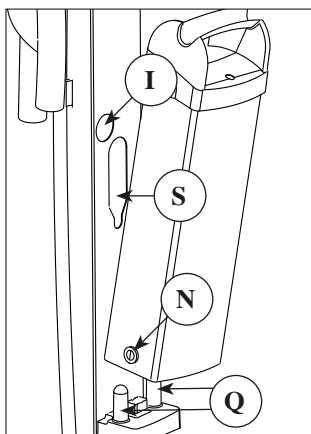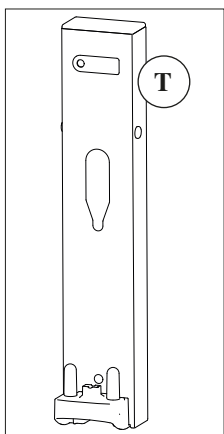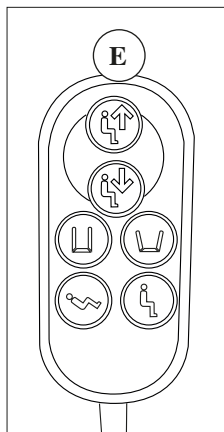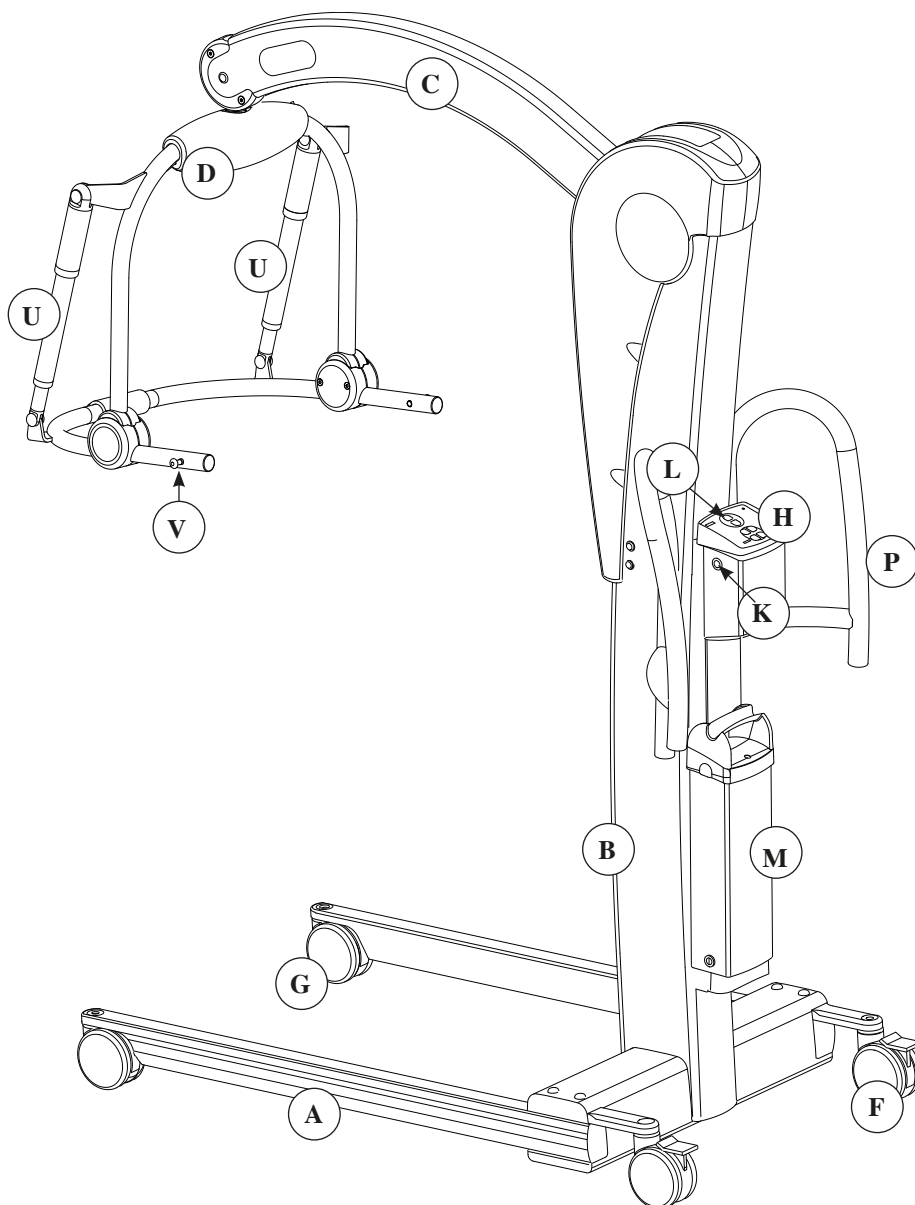


4. Montagevoorschriften

- stap 1. Schroef de stuurhendel vast op de mast. Gebruik de lange schroeven bovenaan en de korte onderaan.




LET OP!


SOMMIGE ONDERDELEN KUNNEN ZWAAR ZIJN EN 2 PERSONEN VEREISEN VOOR DE INSTALLATIE.

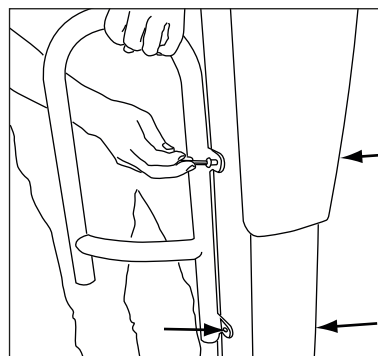


- stap 2. Plaats het onderstel op de grond en blokkeer de remmen van de achterwielen.

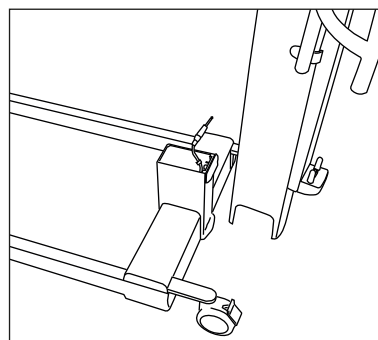


- stap 3. Zet de mast recht achter het onderstel en koppel de mast eraan vast via de fiche die zich onderaan in de mast bevindt

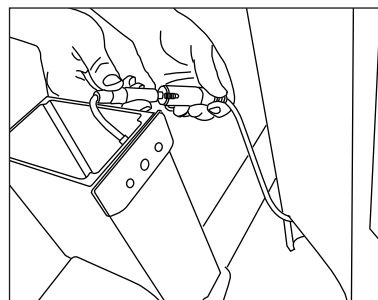


- stap 4. Plaats de mast op het onderstel.
Noot: Besteed aandacht aan uw houding tijdens het tillen (rug recht, door knieën buigen en de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam houden).

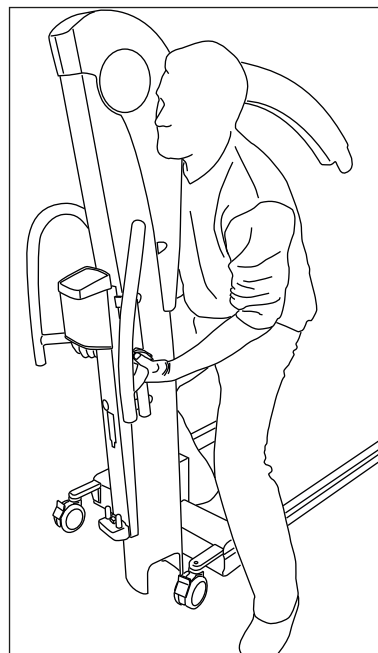

- stap 5. Na de plaatsing draait u de mast vast op het onderstel via de bijgeleverde bouten & rondsels die voor- en achteraan worden ingedraaid.

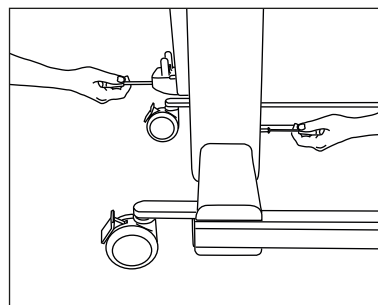


- stap 6. Plaats de batterijkast.
Bij de plaatsing van de batterijkast moet u er goed op letten dat het geleidingsblokje aan de achterzijde van de batterijkast in de gleuf schuift en dat de batterijkast over de positioneerpennen wordt geplaatst.

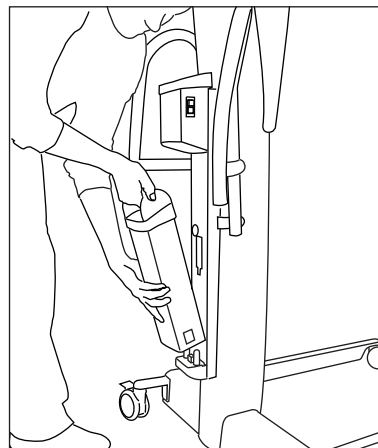


- stap 7. Koppel de handbediening aan de bedieningskast.

- stap 8. Neem de onderdelen van het kanteljuk. Koppel de fiche aan.

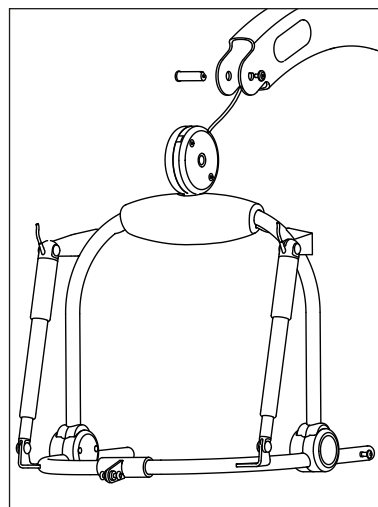


- stap 9. Monteer het kanteljuk aan de hefarm met de bijgeleverde as. Breng Loctite 270 aan op de vijs.

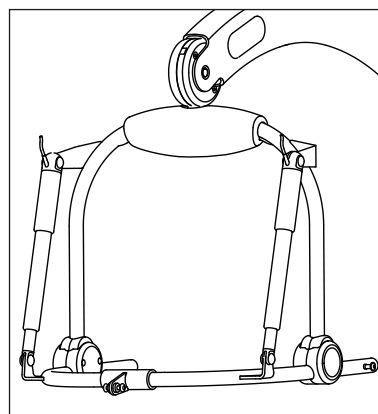

5. Verklaring van de symbolen

5.1. Symbolen op het typeplaatje en verpakking


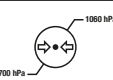
	Droog houden
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een temperatuur tussen -10 en +40°C.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtvochtigheid tussen de 30 en 70%.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtdruk tussen de 700 en 1060hPa.
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Model nummer
	Productiedatum
	Serienummer
	Fabrikant naam en adres
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Dubbel geïsoleerd toestel Uitrusting van Klasse II volgens EN 60601-1
	Type B in overeenstemming met EN 60601-1.
	Dit apparaat voldoet aan de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745.
	In de Europese Unie dient dit product via een daartoe gespecialiseerd recyclingbedrijf te worden gerecycled. Dit product mag niet aan de normale huisvuil verwijdering worden aangeboden.
	Duidt aan dat dit een medisch hulpmiddel is volgens verordening (EU) betreffende medische hulpmiddelen 2017/745
	Unique device identification
IPX0	Internationale protectiewaarde tegen vaste objecten en water. Geen bescherming tegen water; het toestel mag niet gebruikt worden bij regen of mag niet blootgesteld worden aan drup.
SWL	Maximaal tilvermogen

6. Werking

6.1. Bediening

De tillift wordt bediend door de druktoetsen op de handbediening of via het bedieningsklavier op de bedieningskast.

	hefarm omhoog
	hefarm omlaag
	onderstel dicht
	onderstel open
	kanteljuk naar lig
	kanteljuk naar zit

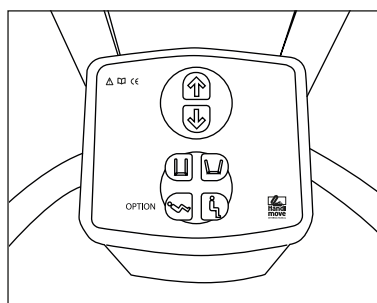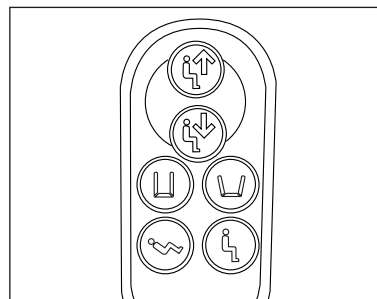


6.2. De tillift operationeel maken

Om de tillift aan te schakelen drukt u de groene knop op de bedieningskast in, om hem uit te schakelen de rode knop.

De rode knop doet tegelijkertijd dienst als noodschakelaar.



Pas wanneer de groene knop is ingedrukt en de opgeladen batterijkast in de houder zit, zal de led van het bedieningsklavier oplichten en is de tillift operationeel.

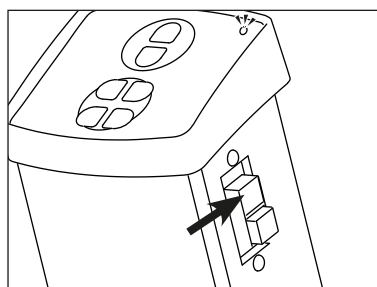

6.3. Batterijkast

Bij de plaatsing van de batterijkast moet u er goed op letten dat het geleidingsblokje aan de achterzijde van de batterijkast in de gleuf schuift en dat de batterijkast over de positioneerpennen wordt geplaatst.



De batterijkast is beveiligd tegen kortsluiting met een zekering van 20A. (Keramische zekering: 6,3 x 32mm 20A - 250V - slow-blow)

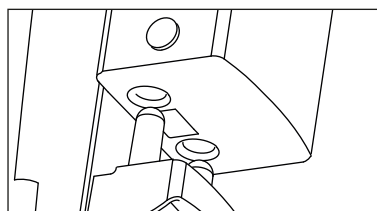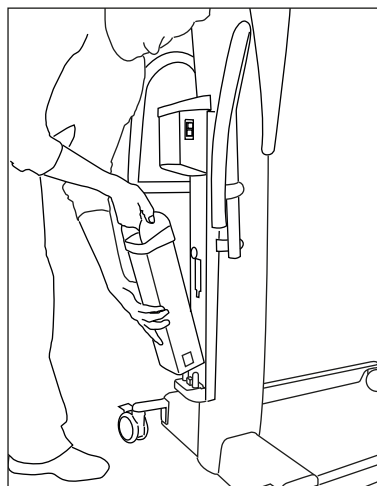

6.4. Mechanische nooddaling

De lift beschikt over een mechanische nooddaling. Deze mag enkel gebruikt worden in noodsituaties en ze bevindt zich achter de batterijkast in de mast.

Verwijder de batterijkast en druk met een puntig voorwerp, zoals bv. een balpen, op de knop van de nooddaling.

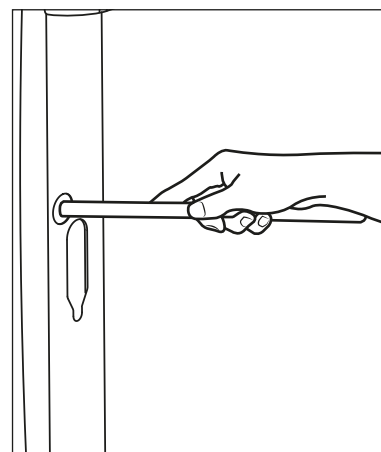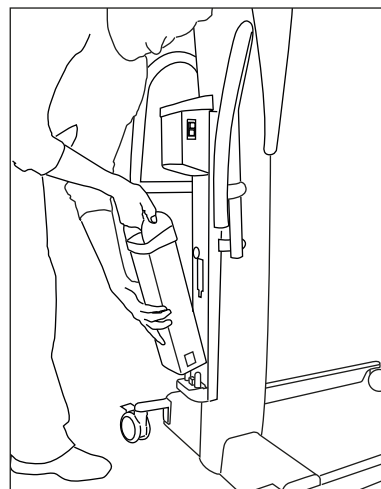

6.5. Laden van de batterijen


Om de levensduur van de batterijen te verlengen en lege batterijen te vermijden is het aan te raden om deze regelmatig te laden. De automatische lader maakt overladen onmogelijk.

Hoe laden?

- Opladen kan ofwel via een wandlader (A) ofwel kan u rechtstreeks de lader aansluiten op de batterijkast (B) en op het net (230 V).
- Het verklikkerlicht van de lader geeft volgende functie weer:
 - Oranje/geel : batterijen worden geladen
 - Groen : batterijen zijn volledig opgeladen

Opmerking:

Als de lift een geluidssignaal geeft, moeten de batterijen dringend worden opgeladen.

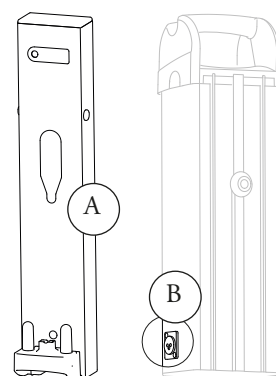

LET OP!

GEBRUIK DE LIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN

6.6. Verplaatsen en tillen


Tijdens de transfer van de gebruiker verplaatst u de lift met behulp van de hendels aan de achterzijde van de mast.

Tijdens het stijgen en dalen van de tillift de remmen niet activeren. Activeer de remmen wanneer er een kans bestaat dat de lift schade kan toebrengen aan de gebruiker, door zich te verplaatsen naar de gebruiker toe, b.v. bij het tillen van de grond.



LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE TILLIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUOPENING STOOT.

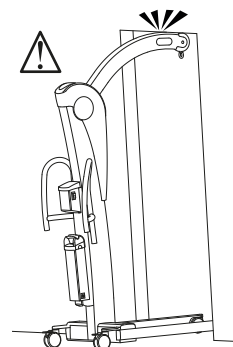


BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG EN ZO DICHT MOGELIJK BIJ ELKAAR TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.

GEBRUIK DE LIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

DE TILLIFT NOOIT ZIJDELINGS BELASTEN, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, **NOOIT** TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT.

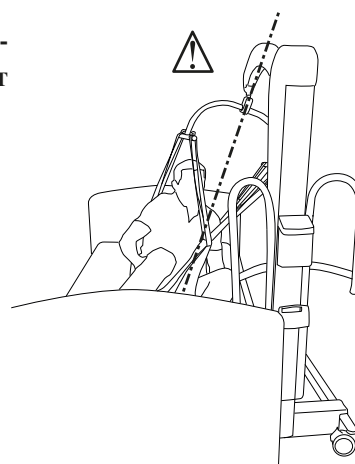

GEBRUIK DE TILLIFT NOOIT OP OPPERVLAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.

7. Reinigen, opbergen en verwijderen

7.1. Het toestel reinigen

- Reinig het toestel met gewone zeep en een lichtjes vochtige doek.
- Vermijd het vochtig worden van elektrische onderdelen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of overvloedig water.
- Indien u wenst te desinfecteren: gebruik een product op basis van alcohol.

7.2. Het toestel opbergen

- Berg de Victor op in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen 30 en 70% en een temperatuur tussen -10°C en + 40°C.
- Zorg ervoor dat de noodschakelaar ingedrukt is wanneer u het toestel opbergt.
- Koppel de batterijen los indien u de Victor voor lange tijd niet gebruikt.

7.3. Verwijderen bij einde levensduur

- Verpakking: verpakkingskarton en plastic folie kunnen gerecycleerd worden.
- Elektrische en elektronische onderdelen en batterijen: moeten verwijderd worden conform de EAAE regelgeving (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), of in overeenstemming met lokale of nationale regelgeving.
- Tildoeken: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.
- Tillift, rails, tiljuk en tilbeugel: onderdelen die voornamelijk bestaan uit metaal moeten als metaal worden gerecycleerd.
- Kunststof onderdelen en toebehoren van de tilbeugel: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.

8. Inspectie

8.1. Inspectie voor elk gebruik

- Werking van de noodschakelaar (J). Indien de noodschakelaar geactiveerd is, mag het toestel niet werken.
- Het vrij rollen van de wielen (G) & (F). Wielen moeten kunnen ronddraaien.
- Het openen en sluiten van het onderstel (A).
- Visuele schade aan het toestel.

8.2. Jaarlijkse inspectie

- De mobiele tillift moet minstens 1 keer per jaar aan een inspectie worden onderworpen.
- De inspectie mag enkel uitgevoerd worden door Handi-Move of een door Handi-Move erkend monteur.
- Na de inspectie wordt er een rapport opgemaakt over welke testen er zijn uitgevoerd en welke onderdelen er vervangen zijn.

9. Problemen oplossen

- De tillift werkt helemaal niet:
 - Controleer of de noodschakelaar is ingedrukt en de led brandt.
 - Test de functies op de bedieningskast.
 - Test de handbediening.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De handbediening werkt niet:
 - Probeer de functies op de bedieningskast.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De wielen: het rollen verloopt moeizaam:
 - Controleer of er zich geen vuilophoping op de wielen heeft gevormd.
- De opwaartse beweging verloopt trager dan normaal:
 - Laad de batterijen op
 - Indien dit geen verbetering brengt belt u de technische dienst (zie hoofdstuk 12).

10. Technische specificaties

10.1. Technische specificaties mobiele tillift Victor




Max tilvermogen	225 kg	
Nooddaling	Mechanisch	
Noodschakelaar	aanwezig	
Gewicht	onderstel + mast + stuurhendel	58 kg
	onderstel	22,6 kg
	mast + stuurhendel	35,55 kg
	stuurhendel (1 stuk)	1,65 kg
	batterijkast	6,2 kg
Constructie	aluminium; gelakt	
Covers	ABS	
Wielen	ø 100 mm (achteraan voorzien van rem)	
Motor/pomp	24 Vdc, 13 A, 130 bar	
	elektrisch/hydraulisch	
Batterijen	dicht en onderhoudsvrij 2 x 12 Vdc; 8 Ah	
Batterijindicatie	Akoestisch	
Aantal liften bij volle batterijen	160 bij 90 kg / 50 cm	
Laden	Type Mascot 9940/2541	
	Ingang: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasse II	
	Uitgang: 24 Vdc Max	
	1.3 A (type 9940) 1.2 A (type 2541)	
Laadtijd vanaf signaal	4 uur	
Geluid	dba 66	
Veiligheidsklasse	IPx0	
Verwachte levensduur	10 jaar , onder voorbehoud van correct gebruik, onderhoud (zie punt 7) en jaarlijkse inspecties (zie punt 8) (batterijen hebben een geschatte levensduur van 2 à 4 jaar afhankelijk van het gebruik)	
Benodigde kracht	Bij de start	90 N
	Tijdens rijden	60 N
Draaicirkel	1320 mm	
Max. werkcyclus liftaandrijving	15% MAX (1min. AAN / 7min. UIT)	

SNELHEDEN

Stijgen (zonder belasting)	5,2 cm/s
Dalen (zonder belasting)	4,9 cm/s
Stijgen (belasting 90kg)	4,9 cm/s
Dalen (belasting 90kg)	5,7 cm/s
Stijgen (belasting 225kg)	4,6 cm/s
Dalen (belasting 225 kg)	5,7 cm/s
Onderstel openen/sluiten	2 s

AFMETINGEN (IN MM)

A	1725	H	775
B	660	H'	1465
B'	545	H1	1530
B1	1150	H2	2240
C	440	h	120
C1	170	L	1275
C2	620	L'	710
E	54		

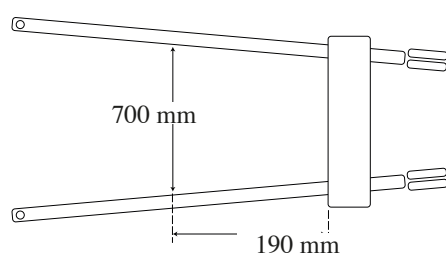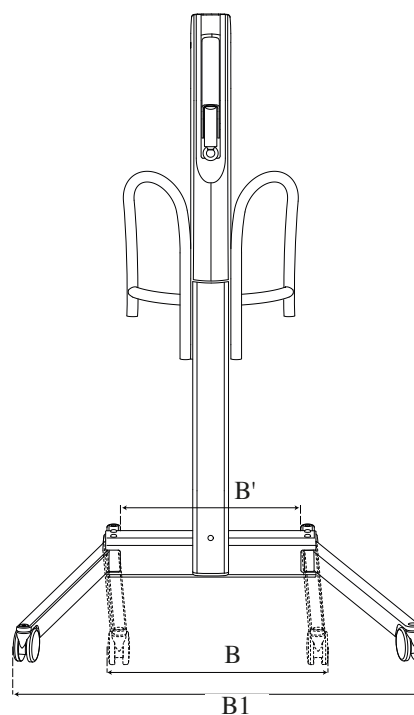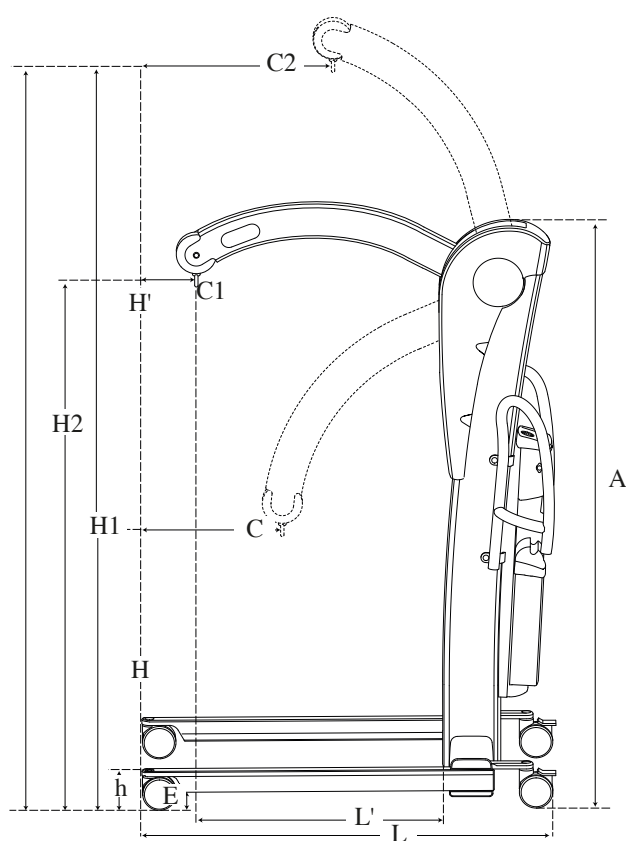


10.2. Technische specificaties kanteljuk

Max tilvermogen	225 kg
Gewicht	8 kg
Constructie	inox; gelakt
Covers	ABS
Actuators	24 Vdc max 4 A
Snelheid	14 sec. (zonder belasting)

AFMETINGEN (IN MM)

A	620
B	500
C	570
D	475

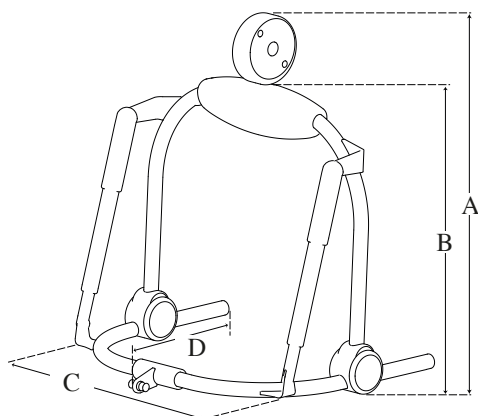

11. Onderdelenlijst

Art. nr. 2600 9040	Batterijkast
Art. nr. 3050 0000	Lader
Art. nr. 2600 9030	Wandlader
Art. nr. 2580 0102	6-kanaals handbediening

Een gedetailleerde lijst is beschikbaar op aanvraag.

12. Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie

Contacteer uw Handi-Move verdeler voor reserveonderdelen, onderhoud, jaarlijkse inspectie en vrijblijvende informatie.

Adres van een Handi-Move verdeler in uw buurt:

Handi-Move nv, Ten Beukeboom 13, 9400 Ninove
Tel + 32 54 31 97 10

E-mail: info@handimove.com

Website: www.handimove.com

13. Garantie

Deze uitrusting wordt verkocht onder een exclusieve **garantie van 2 jaar** vanaf verkoopdatum.

De producent garandeert dat de uitrusting vrij van gebreken is inzake materiaal en vakmanschap. Wij verklaren dat we alle producten, of onderdelen ervan, zullen herstellen of vervangen, die binnen de vermelde garantieperiode naar onze fabriek zijn teruggestuurd, en waarvan na onderzoek blijkt dat het product gebrekkig is. Dit geldt niet voor batterijen. De kosten voor het terugzenden van herstellende of vervangen producten worden door de fabriek betaald.

Deze garantie is niet van toepassing als de toestellen het voorwerp zijn geweest van verkeerd gebruik, onjuiste bedrading (niet de onze), foutieve installatie, of in gebruik werden genomen zonder rekening te houden met de instructies die wij hiervoor hebben gegeven of gerepareerd of gewijzigd werden door anderen dan de fabriek of de officiële vertegenwoordiger ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden het recht voor om onze toestellen ten allen tijde voor de levering geheel of gedeeltelijk aan te passen om verbeteringen aan te brengen die door het bedrijf als noodzakelijk worden beschouwd. Dit houdt niet in dat we ons ertoe zouden verbinden om vroeger geleverde toestellen te wijzigen of aan te passen of om nieuwe toestellen te leveren die voldoen aan vroegere specificaties.

Beschadigingen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de toestellen worden gemeld. Zichtbare schade aan de verpakking moet bij de levering op de ontvangstnota worden vermeld en bevestigd aan de producent.

Deze garantie vervangt nadrukkelijk alle andere expliciete of impliciete garanties. Wij gaan geen enkele verbintenis aan, en geven niemand de toestemming om voor ons een verbintenis aan te gaan, in verband met de verkoop of het gebruik van deze toestellen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor daaruit volgende of uitzonderlijke schade. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot toebehoren of onderdelen die niet door ons werden geleverd.

14. EG-verklaring van overeenstemming

CE EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

Manufacturer / Fabrikant / Fabricant / Hersteller

Handi-Move NV - Ten Beukeboom 13 - B 9400 Ninove - Belgium

SRN (Single Registration Number): BE-MF-000016949

Name device **Handi-Move Mobile Lift Victor**
Naam hulpmiddel **Handi-Move Mobiele Lift Victor**
Nom dispositif **Handi-Move Soulève-personne Mobile Victor**
Name Hilfsmittel **Handi-Move Mobiler Lifter Victor**
Basic UDI-DI **54040166MBLPH6**

	Model numbers
With swivelhook Met draainagel Avec tourillon Mit Drehnagel	2600
With tilting spreader bar Met kanteljuk Avec fléau basculant Mit Kippjoch	2610 + 2145

Classification MDR **Class I (rule 1 + 13, MDR2017/745 annex VIII)**

Harmonised standards applied / Geharmoniseerde normen toegepast
Normes harmonisées appliquées / Harmonisierte Standards angewendet

EN ISO 10535:2006 ; EN 60601-1:2006/A1:2013 ;
EN ISO 15223-1:2021 ; EN ISO 14971:2019/A11:2021

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Handi-Move NV. The devices covered by the present EU declaration are in conformity with the Medical Devices Regulation MDR 2017/745 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Handi-Move NV. De toestellen die onder deze EU-verklaring vallen, zijn in overeenstemming met de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Handi-Move NV. Les dispositifs couverts par la présente déclaration UE sont conformes au Règlement sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et la Directive RoHS 2011/65/UE.

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Handi-Move NV ausgestellt. Die von dieser EU-Erklärung erfassten Geräte entsprechen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Stefan Van Raemdonck bvba
Director Handi-Move international
Ninove, 27-04-2023

