


HANDI-MOVE MODEL 2420-2432

WANDLIFT

GEBRUIKSAANWIJZING

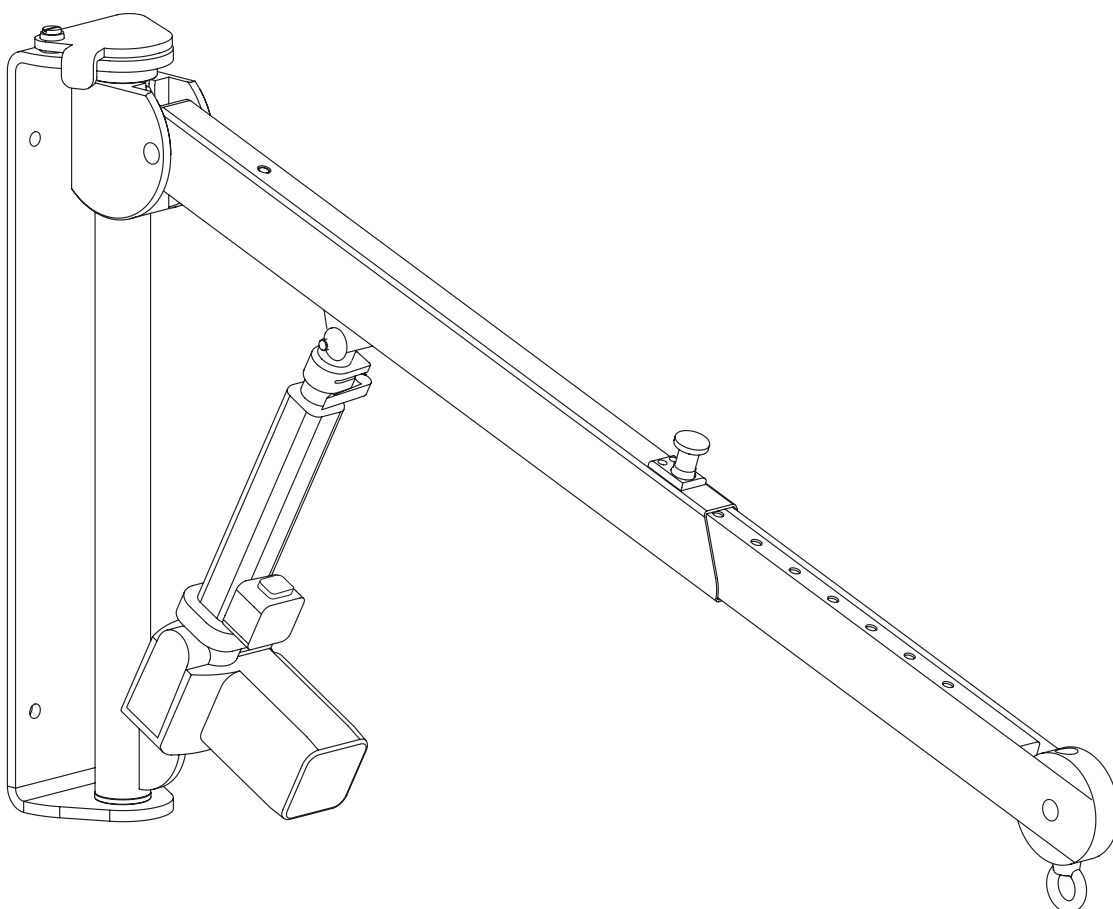

**Lees deze handleiding grondig voor gebruik.
Laat uw tilsysteem jaarlijks inspecteren. Zie deze handleiding voor meer informatie.
De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.**

Inhoudsopgave

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Toepassingsgebied	5
3.	Productinformatie	6
4.	Montagevoorschriften	7
4.1.	De Wandlift in de wandplaat plaatsen.....	7
4.2.	De Wandlift uit de wandplaat nemen.....	8
4.3.	De uitschuifbare draagarm.....	9
4.4.	Wandliftverlengstuk (artikelnummer 2413).....	10
5.	Verklaring van de symbolen	11
5.1.	Symbolen op het typeplaatje en de verpakking.....	11
5.2.	Typeplaatje en verpakkingslabel.....	12
5.3.	Veiligheidslabels	12
6.	Werking.....	14
6.1.	Wandlift met 24 V DC-transformator voor gebruik in natte omgevingen	14
6.2.	Wandlift op netvoeding	14
6.3.	Werkbereik van de wandlift	14
6.4.	Tilbereik	14
6.5.	Het veiligheidsmechanisme	15
6.6.	Noodstop.....	16
6.7.	Nooddaling	16
7.	Reinigen, opbergen en verwijderen	18
7.1.	Het toestel reinigen.....	18
7.2.	Het toestel opbergen.....	18
7.3.	Verwijderen bij einde levensduur	18
8.	Inspectie	19
8.1.	Inspectie vóór elk gebruik	19
8.2.	Jaarlijkse inspectie	19
9.	Problemen oplossen.....	20
10.	Technische specificaties.....	21
11.	Onderdelenlijst.....	22
12.	Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie.....	23
13.	Garantie	24
14.	EG-verklaring van overeenstemming.....	25

1. Veiligheidsvoorschriften

Definities:


- De gebruiker: de persoon die het toestel gebruikt, bijvoorbeeld de verzorger, een familielid, de rolstoelgebruiker enzovoort.
- De verantwoordelijke: de persoon die verantwoordelijk is voor het juiste gebruik en het onderhoud van het toestel.

Alvorens het toestel te gebruiken, vergewis u ervan dat:


- de gebruiker de gepaste instructie en training heeft gekregen.
- deze gebruiksinstructies aandachtig werden doorgenomen en begrepen door de gebruiker en de verantwoordelijke.
- de werking van de nooddaling en de noodschakelaar uitgelegd en gedemonstreerd werden aan de gebruiker en de verantwoordelijke.
- de verzorger steeds voldoende aandacht schenkt aan de persoon die getild wordt en zijn omgeving (vb zorgen dat er genoeg ruimte is zodat de getilde persoon niet tegen meubels stoot).
- het toestel enkel gebruikt wordt met Handi-Move artikelen/toebehoren of door Handi-Move goedgekeurde artikelen/toebehoren.
- de Wandlift enkel gebruikt wordt om personen te tillen.
- u het toestel niet gebruikt wanneer het gebreken vertoont (zie "8. Inspectie" p.16). Voor herstelling neemt u contact op met uw lokale Handi-Move verdeler.
- indien er onderlinge elektromagnetische invloed wordt uitgeoefend tussen dit toestel en een ander toestel, deze toestellen niet samen mogen gebruikt worden. (bv. afstandsbedieningen van TV, radio, GSM,...)
- de gebruikstemperatuur tussen -10°C en +40°C ligt. De luchtvochtigheid tussen de 30% en 70% ligt.
- u de nationale voorschriften in acht neemt wanneer dit toestel in een vochtige omgeving wordt gebruikt.

LET OP!


VERMIJD OPWAARTSE KRACHT OP DE ACTUATOR OF ANDERE ONDERDELEN VAN DE WANDLIFT. HIERDOOR KUNNEN DEZE LOS KOMEN TE ZITTEN EN LOSKOMEN VAN DE WANDPLAAT WAARDOOR DE GEBRUIKER EN/OF DE VERZORGER ERNSTIG LETSEL KAN OPLOPEN.

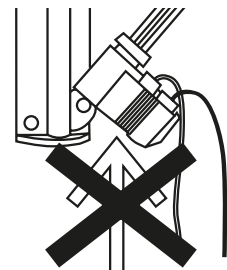


CONTROLEER ALTIJD OF DE VEILIGHEIDSBEGEL VERGRENDELD IS.

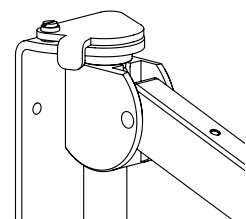


CONTROLEER ALTIJD OF DE WANDLIFT GOED VASTZIT OP DE WAND-PLAAT. ALS DE WANDLIFT NIET GOED VASTZIT KAN DEZE LOSKOMEN TIJDENS HET GEBRUIK WAARDOOR DE GEBRUIKER EN/OF VERZORGER ERNSTIG LETSEL KAN OPLOPEN.

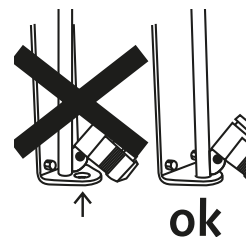

VERPLAATS DE WANDLIFT NOOIT DOOR AAN DE ACTUATOR TE TREKKEN OF ER TEGEN TE DUWEN.

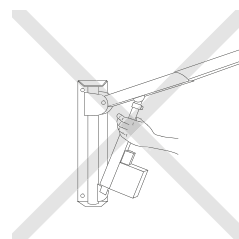

VERGEWIS U ERVAN DAT DE BLOKKEERSTIFT ZICH HEEFT VASTGE-KLIKT OF PROBEER DE DRAAGARM TE VERLENGEN ZONDER OP HET MECHANISME TE DRUKKEN OM DIT TE CONTROLEREN. BIJ HET VASTKLIKKEN HOORT U EEN "KLIK".

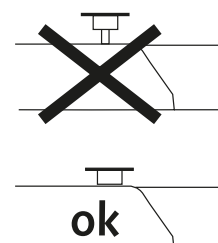

PAS NOOIT DE LENGTE VAN DE ARM AAN TERWIJL DE GEBRUIKER OPGETILD WORDT OF AAN DE WANDLIFT HANGT.



GEBRUIK DE LIFT NIET ONDER STROMEND WATER.

DE MAGNETEN IN DE HANDBEDIENING KUNNEN DE WERKING VAN PACE-MAKERS EN GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN BEÏNVLOEDEN. WANNEER DE AFSTAND TUSSEN DE HANDBEDIENING EN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN) GROTER IS DAN 10 CM IS ER GEEN INVLOED MEER VAN DE MAGNETEN OP DE WERKING VAN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN). CONTACTEER UW ARTS INDIEN U HIEROVER MEER INFORMATIE WENST.

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet door de gebruiker en/of patiënt worden gemeld aan de fabrikant. In de Europese Unie moet elk ernstig voorval steeds gemeld worden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

Max. tilvermogen: 145 kg


2. Toepassingsgebied

De Wandlift wordt gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, geriatrie centra, verzorgingstehuizen, dagcentra en privéwoningen, om personen met bewegingsstoornissen te transfereren. Zodoende wordt overbelasting bij verzorgers, door het dragen van te zware lasten, vermeden en een verbeterde mobiliteit aan personen met een handicap gegarandeerd. Transfers gebeuren van of naar een bed, ligstoel, rolstoel, bad, toilet, grondoppervlak, verzorgingstafel, ... enzovoort. De Wandlift is draagbaar en kan in alle mogelijke ruimtes geplaatst worden en gemakkelijk van steun tot steun of van wand tot wand verplaatst worden. De Wandlift mag in vochtige ruimtes worden gebruikt, de handbediening is tegen het binnendringen van vocht en stof beschermd.

3. Productinformatie

In deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar de volgende onderdelen van de Wandlift:


- A Wandplaat
- B Veiligheidsbeugel
- C Staaf
- D Draagarmscharnierpunt
- E Draagarm
- F Blokkeerstift
- G Verlengstuk
- H Draainagel
- I Actuator
- J Nooddaling
- K Noodstop
- L Handbediening
- M 24V-transformator incl. sturing en noodstroomvoorziening

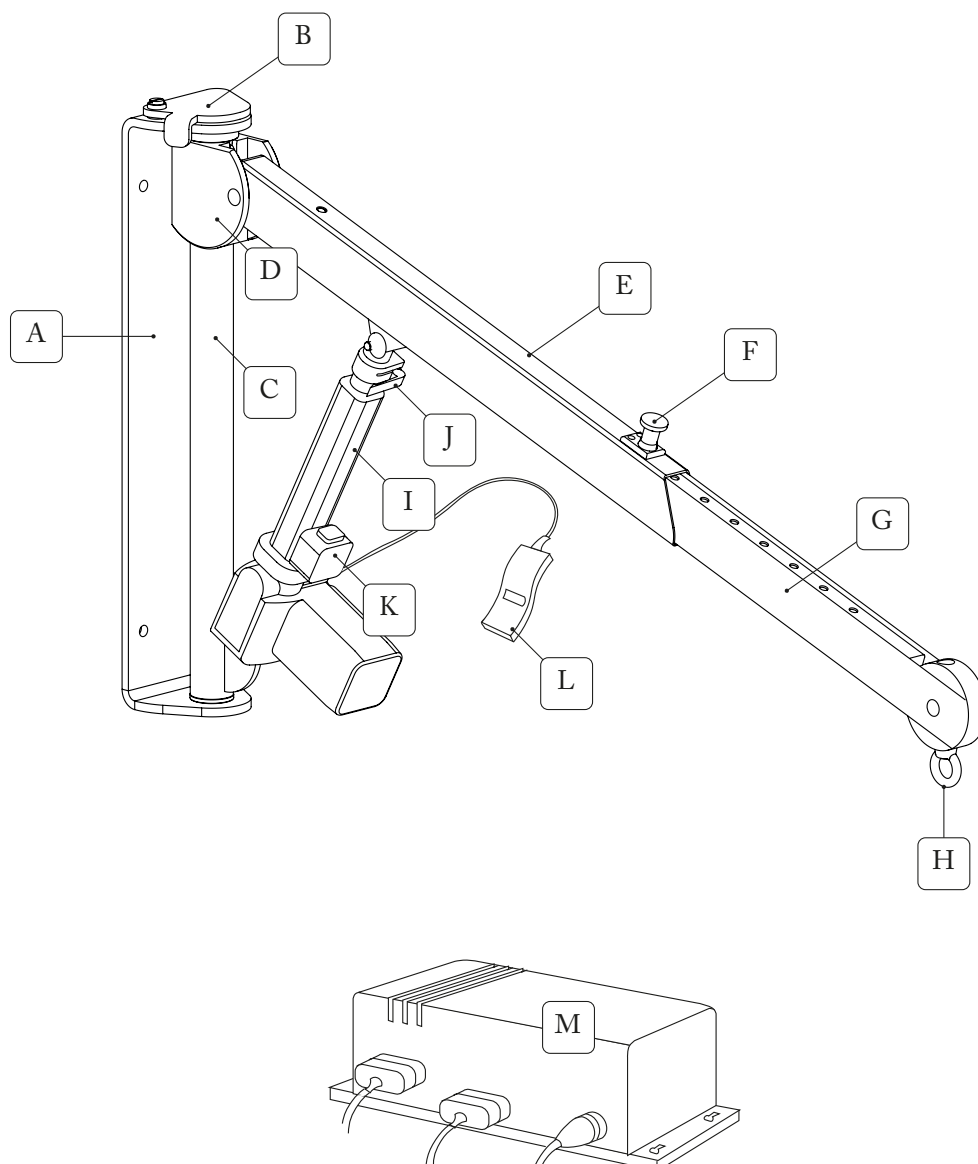


4. Montagevoorschriften

4.1. De Wandlift in de wandplaat plaatsen


stap 1. Open de veiligheidsbeugel.

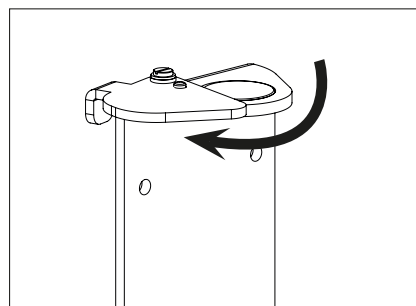


stap 2. Hou het onderste gedeelte van de staaf naar u toe terwijl u de met plastic bedekte bovenkant in het gat bovenaan de wandplaat steekt.

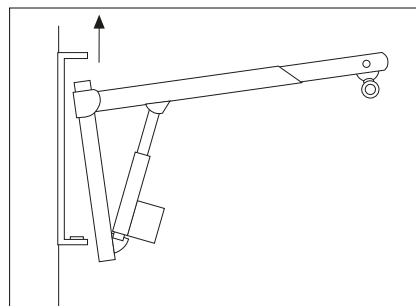


stap 3. Duw de staaf recht, zodat hij recht boven het gat onderaan de wandplaat staat.

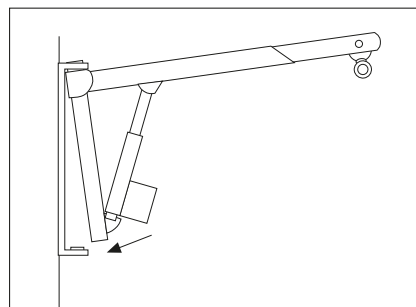

stap 4. Duw de staaf naar beneden, zodat de met plastic bedekte onderkant in het overeenstemmende gat onderaan de wandplaat glijdt.

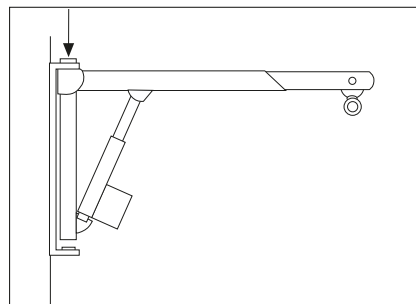

stap 5. Vergewis u ervan dat de staaf stevig in de wandplaat is geïnstalleerd.

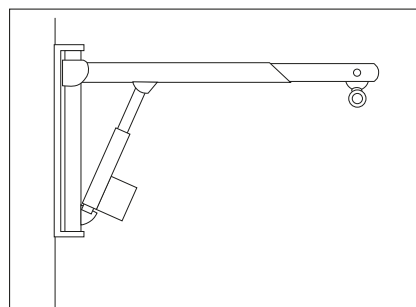




stap 6. Sluit de veiligheidsbeugel.



LET OP!


CONTROLEER ALTIJD OF DE WANDLIFT GOED VASTZIT OP DE WANDPLAAT. ALS DE WANDLIFT NIET GOED VASTZIT, DAN KAN DEZE LOSKOMEN TIJDENS HET GEBRUIK WAARDOOR DE GEBRUIKER EN/OF VERZORGER ERNSTIG LETSEL KAN OPLOPEN.

CONTROLEER ALTIJD OF DE VEILIGHEIDSBEUGEL VERGRENDELD IS.

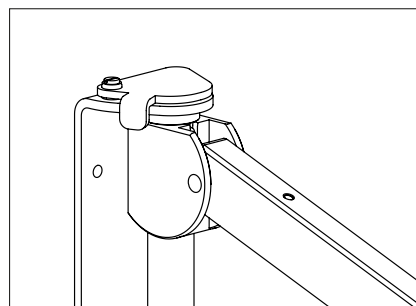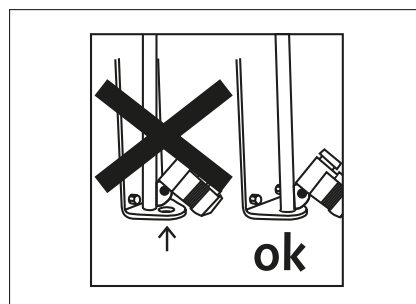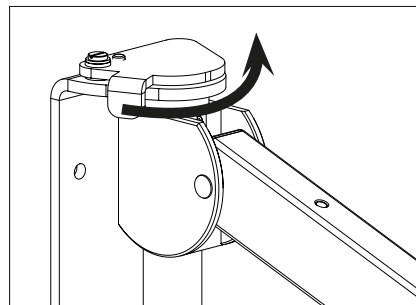


4.2. De Wandlift uit de wandplaat nemen


- stap 1. Maak de tilbeugel of het tildoek los en duw de uitschuifbare arm opnieuw in de kortste positie.
- stap 2. Laat de arm tot op schouderhoogte zakken.
- stap 3. Open de veiligheidsbeugel.

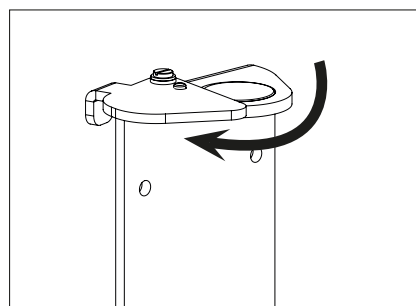

- stap 4. Maak de stroomkabel los en rol hem op.
- stap 5. Neem de staaf vast en duw de met plastic bedekte bovenkant boven het gat bovenaan de wandplaat uit.

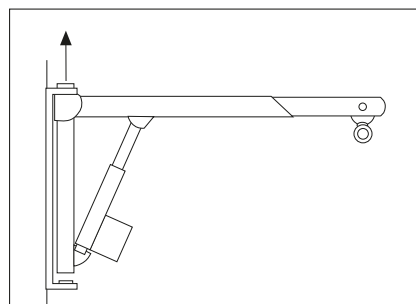

- stap 6. Neem de draagarm vast en leg deze op uw schouder. Neem de staaf vast met dezelfde hand bij de aangegeven handgreep onder het gele glijblok.
- stap 7. Til de Wandlift verticaal circa 2 tot 3 cm omhoog. Hierdoor komt de onderkant van de staaf los, waarna deze naar voren geschoven kan worden over de onderste eindplaat van de wandplaat. Laat het bovenste gedeelte van de staaf zakken en haal de staaf uit de verankering van de muurplaat.

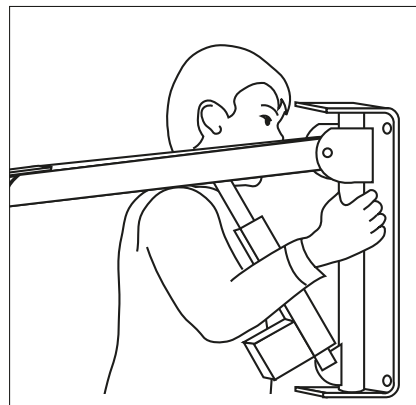


4.3. De uitschuifbare draagarm


De Wandlift kan in acht (8) verschillende posities worden verlengd.

4.3.1. Uitschuiven / inschuiven van de draagarm

- stap 1. Trek aan de blokkeerstift.
- stap 2. Schuif de uitschuifbare draagarm uit of in tot de gewenste lengte.

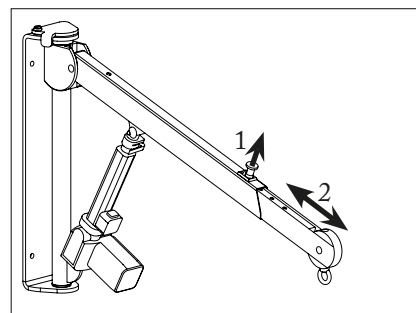


- stap 3. Laat de blokkeerstift los.
- stap 4. Trek of duw verder tot u een "klik" hoort. De blokkeerstift is dan automatisch vergrendeld in een van de acht posities.

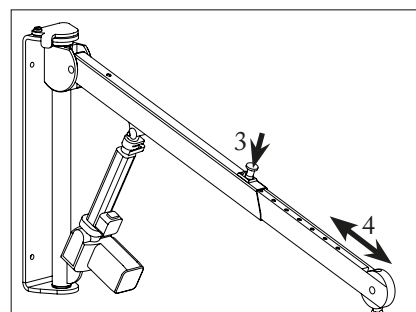


⚠ LET OP!

VERGEWIS U ERVAN DAT DE BLOKKEERSTIFT ZICH HEEFT VASTGEKLIKT OF PROBEER DE DRAAGARM TE VERLENGEN ZONDER OP HET MECHANISME TE DRUKKEN OM DIT TE CONTROLEREN. BIJ HET VASTKLIKKEN HOORT U EEN "KLIK".

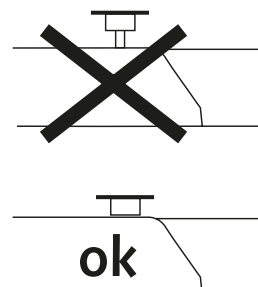

PAS NOOIT DE LENGTE VAN DE ARM AAN TERWIJL U DE GEBRUIKER OPTILT OF TERWIJL IEMAND AAN DE WANDLIFT HANGT.

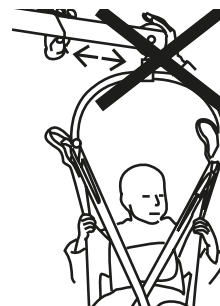

4.4. Wandliftverlengstuk (artikelnummer 2413)

4.4.1. Veiligheidsvoorschriften


Controleer vóór gebruik of het wandliftverlengstuk goed vastzit in de wandplaat. Sluit de veiligheidsbeugel.

Het wandliftverlengstuk is een los accessoire, dat op dezelfde manier op de wandplaat vastgezet wordt als de wandlift zelf.

4.4.2. Toepassingsgebied

Het wandliftverlengstuk kan overwogen worden wanneer extra lengte of werkbereik nodig is.

4.4.3. Productinformatie

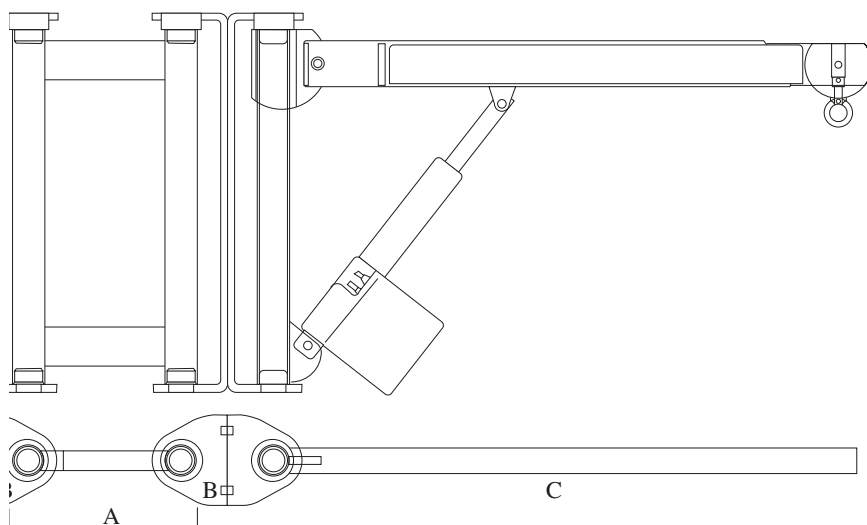

Het wandliftverlengstuk bestaat uit het verlengstuk zelf (A) en twee (2) extra wandplaten (B). Het is gemaakt uit staal en witte epoxycoating en is 38 cm lang.


Het verlengstuk wordt bevestigd aan twee (2) met witte epoxycoating bedekte stalen wandplaten voor bevestiging aan de wandlift (C).

Met het verlengstuk wordt de totale lengte van de wandlift met 35,5 cm uitgebreid (van 95 cm naar 130 cm met de wandliftarm in de kortste positie en van 130 cm naar 165 cm met de wandliftarm in de langste positie).


Het wandliftverlengstuk breidt het werkbereik van de wandlift uit van 180° naar 320°.

5. Verklaring van de symbolen

5.1. Symbolen op het typeplaatje en de verpakking

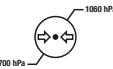	Droog houden
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een temperatuur tussen -10 en +40°C.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtvochtigheid tussen de 30 en 70%.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtdruk tussen de 700 en 1060hPa.
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Model nummer
	Productiedatum
	Serienummer
	Fabrikant naam en adres
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Dubbel geïsoleerd toestel Uitrusting van Klasse II volgens EN 60601-1
	Type B in overeenstemming met EN 60601-1.
	Dit apparaat voldoet aan de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745.
	In de Europese Unie dient dit product via een daartoe gespecialiseerd recyclingbedrijf te worden gerecycled. Dit product mag niet aan de normale huisvuil verwijdering worden aangeboden.
	Duidt aan dat dit een medisch hulpmiddel is volgens verordening (EU) betreffende medische hulpmiddelen 2017/745
	Unique device identification
IP65	Internationale beschermingsnormen (IP) tegen vaste voorwerpen en water. Beschermingsgraad 'Stofvrij' en beschermd tegen waterindringing indien bespoten.
SWL	Maximaal tilvermogen
	Gebruik binnenshuis


5.2. Typeplaatje en verpakkingslabel

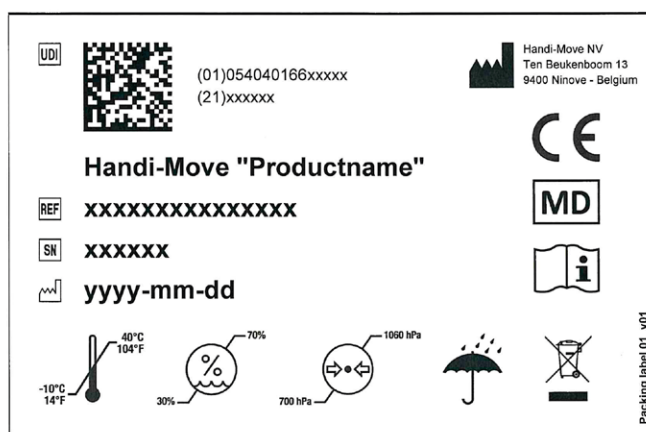


5.3. Veiligheidslabels




Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing vóór u de Wandlift gebruikt.

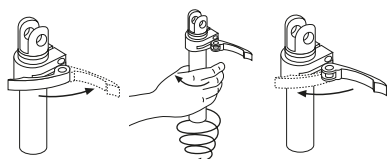

Gebruik van de nooddaling. ("6.7. Nooddaling")

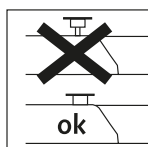


Vergewis u ervan dat de blokkeerstift zich heeft vastgeklit of probeer de draagarm te verlengen zonder op het mechanisme te drukken om dit te controleren. Bij het vastklikken hoort u een "klik".

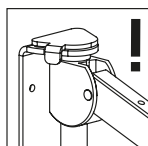


Controleer altijd of de veiligheidsbeugel vergrendeld is.




Aangegeven handgreep ("4.2. De Wandlift uit de wandplaat nemen")

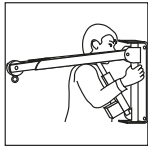


Neem de draagarm vast en leg deze op uw schouder. Neem de staaf vast met dezelfde hand bij de aangegeven handgreep onder het gele glijblok.

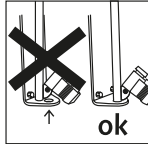


Controleer altijd of de Wandlift goed vastzit op de wandplaat. Als de Wandlift niet goed vastzit, dan kan deze loskomen tijdens het gebruik waardoor de gebruiker en/of verzorger ernstig letsel kan oplopen.

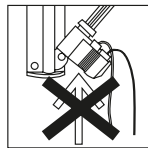

Vermijd opwaartse kracht op de actuator of andere onderdelen van de Wandlift. Hierdoor kunnen deze los komen te zitten en loskomen van de wandplaat waardoor de gebruiker en/of de verzorger ernstig letsel kan oplopen.

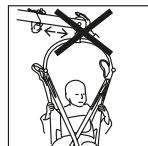

Pas nooit de lengte van de arm aan terwijl de gebruiker opgetild wordt of aan de Wandlift hangt.

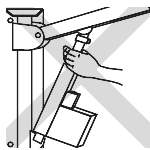

Verplaatst nooit de Wandlift door aan de actuator de trekken of er tegen te duwen.

6. Werking

6.1. Wandlift met 24 V DC-transformator voor gebruik in natte omgevingen

- Om de wandlift te gebruiken sluit eerst de stekker van de actuator en die van de handbediening aan op de transformator.
- Controleer of de transformator aangesloten is op een 220V-240V/50Hz-stopcontact.
- Druk om op- of neerwaarts te bewegen op de knop van de elektronische handbediening.
- In de transformator zitten ook batterijen die enkel in noodgevallen gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een stroomonderbreking.
- Omdat batterijen elk verschillende levenscycli hebben, is het belangrijk dat u de actuator test op de batterijvoeding, om er zeker van te zijn dat ze werken als dat nodig is. U hoeft dit slechts één keer per maand te doen. Opmerking: Wij adviseren een test door één keer omhoog en omlaag te bewegen met gewicht terwijl de transformator niet aangesloten is op een 220V-240V/50Hz-stopcontact. Als u de Wandlift vaak op batterijen laat werken, zullen deze leeg raken.

6.2. Wandlift op netvoeding

- Als de Wandlift op netvoeding werkt, dan kan deze circa 6 keer na elkaar tillen, waarna de actuator stilvalt om af te koelen.
- Om de Wandlift te gebruiken sluit de stekker van de actuator aan op een 220V-240V/50Hz-stopcontact.
- Druk om op- of neerwaarts te bewegen op de omhoog- of omlaagknop op de pneumatische handbediening.

6.3. Werkbereik van de wandlift

Het maximale bereik (uitschuifbare draagarm volledig uitgeschoven) en het minimale bereik (uitschuifbare draagarm volledig ingeschoven) worden loodrecht op de muur gemeten. Deze lengte is afhankelijk van de stand van de draagarm.

De hieronder aangegeven lengtes geven het bereik aan in horizontale, hoogste en laagste stand en voor de minimaal en maximaal uitgeschoven posities.


Afstand van de muur	Horizontale stand	Hoogste stand	Laagste stand
Maximum	130 cm	120 cm	123 cm
Minimum	95 cm	88 cm	89 cm

6.4. Tilbereik

Het tilbereik van de draagarm is afhankelijk van zijn lengte. Aangezien de uitschuifbare arm 8 verschillende lengteposities heeft, is het tilbereik afhankelijk van de gekozen lengte.

Hieronder vindt u het maximale tilbereik omhoog en omlaag met de draagarm in de kortste en de langste positie. Het meten wordt gedaan vanaf de horizontale stand van de draagarm en vanaf het midden van de draainagel.

Draagarmlengte	Omhoog	Omlaag	Totaal bereik
Kortste positie	39 cm (A1)	29 cm (A2)	68 cm (A)
Langste positie	55 cm (A)	43 cm (B2)	98 cm (B)

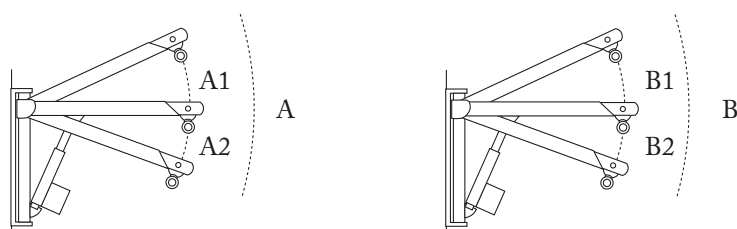


6.5. Het veiligheidsmechanisme


De motor van de wandlift is erg krachtig en zou alles wat de neerwaartse beweging belemmert kunnen beschadigen. Daarom heeft de wandlift een veiligheidsmechanisme dat automatisch in werking treedt als de arm op een hindernis stoot.

Werking van het veiligheidsmechanisme


1. De draagarm wordt naar beneden gebracht.

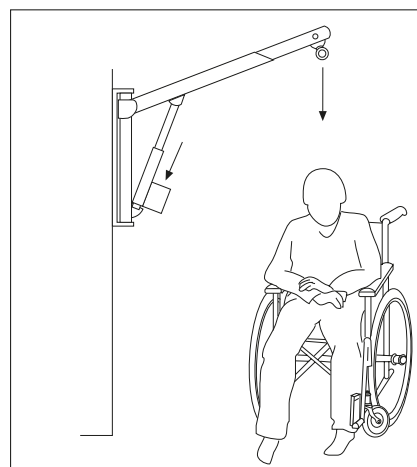

2. De neerwaartse beweging wordt belemmerd.

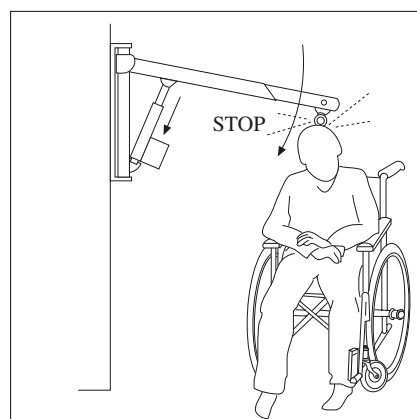


3. Het veiligheidsmechanisme, het draagarmscharnierpunt (A), beweegt automatisch naar beneden.

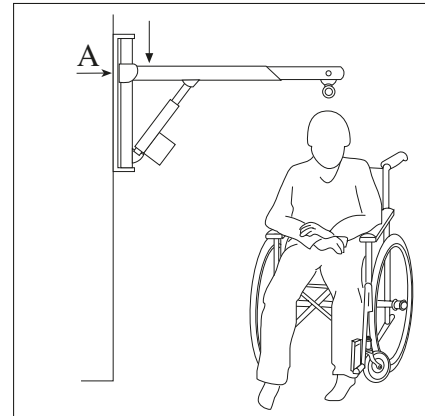

6.6. Noodstop


De noodstop bevindt zich op de cilinder boven de actuator. Duw in geval van nood de knop in. De voeding wordt onderbroken en de tilbeweging stopt. Druk om de noodstop uit te schakelen nogmaals op de knop.

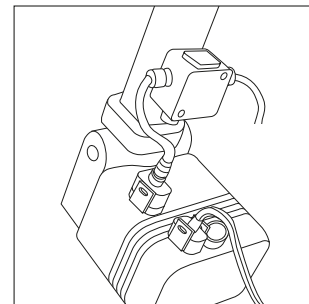


6.7. Nooddaling

Een opgetilde gebruiker kan veilig omlaag gebracht worden in geval van een storing met behulp van de nooddaling. Deze bevindt zich op het punt waar de actuator verbonden is met de draagarm.


- stap 1. Maak de rode klem op de cilinder los, zoals weergegeven op de afbeelding.

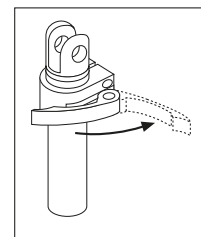

- stap 2. Draai de cilinder in de richting van de klok (van bovenaf gezien). De arm komt dan naar beneden.

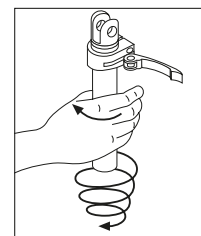

- stap 3. Sluit de klem wanneer de laagste positie bereikt is.

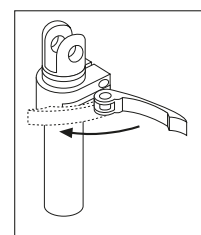



LET OP!

DE NOODDALING MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN IN NOODGEVALLEN OF OM DE WERKING ERVAN TE CONTROLEREN.

HET MECHANISME VAN DE NOODDALING MAG NIET GESMEERD WORDEN MET OLIE, VET OF EEN ANDER SMEERMIDDEL.

VOOR HET DESINFECTEREN OF REINIGEN VAN HET NOODDALINGSMECHANISME MAG ALLEEN PROPYL-ALCOHOL GEBRUIKT WORDEN. ANDERE REINIGINGSMIDDELEN KUNNEN DE WERKING VAN DE NOODDALING VERSTOREN.

NA HET GEBRUIK VAN DE NOODDALING, MOET U CONTROLEREN OF DE RODE KLEM GOED VASTGEZET IS ALVORENS U DE LIFT OPNIEUW MAG GEBRUIKEN.

7. Reinigen, opbergen en verwijderen

7.1. Het toestel reinigen

- Maak de Wandlift voorzichtig schoon met zachte zeep en een vochtige doek.
- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen niet nat worden.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen of te veel water.
- Als u de handbediening wilt ontsmetten, gebruik dan een product op basis van alcohol en een licht bevochtigde doek.

7.2. Het toestel opbergen

- De Wandlift op een droge plek opbergen. De luchtvochtigheidsgraad moet tussen de 30% en 70% zijn en de temperatuur tussen de -10 °C en +40 °C.
- Verwijder de batterijen (enkel art. 2420) wanneer u de Wandlift gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

7.3. Verwijderen bij einde levensduur

- Verpakking: verpakkingskarton en plastic folie kunnen gerecycleerd worden.
- Elektrische en elektronische onderdelen en batterijen: moeten verwijderd worden conform de EAAE regelgeving (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), of in overeenstemming met lokale of nationale regelgeving.
- Tildoeken: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.
- Tillift, rails, tiljuk en tilbeugel: onderdelen die voornamelijk bestaan uit metaal moeten als metaal worden gerecycleerd.
- Kunststof onderdelen en toebehoren van de tilbeugel: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.

8. Inspectie

8.1. Inspectie vóór elk gebruik

Voer een algemene visuele controle uit op eventuele afwijkingen. De volgende punten moeten zorgvuldig gecontroleerd worden:

- De bouten waarmee de wandplaat aan de wand bevestigd is.
- De bouten waarmee de actuator bevestigd is.
- Er mag geen roest aanwezig zijn.
- De Wandlift mag nergens verbogen of beschadigd zijn.
- De uitschuifbare draagarm moet vergrendeld zijn.

8.2. Jaarlijkse inspectie

- De Wandlift moet minstens 1 keer per jaar aan een inspectie worden onderworpen.
- De inspectie mag enkel uitgevoerd worden door Handi-Move of een door Handi-Move goedgekeurde monteur.
- Na de inspectie wordt er een rapport opgemaakt over welke testen er zijn uitgevoerd en welke onderdelen er vervangen zijn.

9. Problemen oplossen

- De lift werkt helemaal niet. Controleer:
 - Of de stekker van de actuator of transformator aangesloten is op een stopcontact.
 - De handbediening.
 - De externe aansluitingen.

10. Technische specificaties

Max. tilvermogen	145 kg
Nooddaling	Mechanisch
Noodstop	Aanwezig
Gewicht	16 kg
Constructie	Gelakt staal
Batterijen	alleen bij model 2420 - 4 x 6 V - 1.2 Ah
Motor	2420-2423: 24 V - 2430-2433: 110/230 V
Veiligheidsklasse	IP 66 (motor) - IP 67 (handbediening)
Verwachte levensduur	10 jaar, onder voorbehoud van correct gebruik, onderhoud (zie punt 7) en jaarlijkse inspecties (zie punt 8) - (batterijen hebben een geschatte levensduur van 2 à 4 jaar, afhankelijk van het gebruik)
Max. werkcyclus liftaandrijving	15% MAX (1min. AAN / 7min. UIT)

11. Onderdelenlijst

Wandlift op netvoeding (art. 2430 - 2433)

art. 2222 0000..... Pneumatische handbediening

Wandlift met 24 V DC-transformator (art. 2420 - 2433)

art. 2230 0200..... Transformator (110 V / 24 V)

art. 2231 0100..... Transformator (230 V / 24 V)

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
art. 2230 0300..... Elektrische handbediening

art. 2230 0400..... Batterij / per stuk (back-upbatterij)

12. Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie

Contacteer uw Handi-Move verdeler voor reserveonderdelen, onderhoud, jaarlijkse inspectie en vrijblijvende informatie.

Adres van een Handi-Move verdeler in uw buurt:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write the address of a Handi-Move distributor in their neighborhood.

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove
België
Tel. + 32 54 31 97 10
e-mail: info@handimove.com
website : www.handimove.com

13. Garantie

Deze uitrusting wordt verkocht onder een exclusieve garantie van 2 jaar vanaf verkoopdatum.

De producent garandeert dat de uitrusting vrij van gebreken is inzake materiaal en vakmanschap. Wij verklaren dat we alle producten, of onderdelen ervan, zullen herstellen of vervangen, die binnen de vermelde garantieperiode naar onze fabriek zijn teruggestuurd, en waarvan na onderzoek blijkt dat het product gebrekkig is. Dit geldt niet voor batterijen. De kosten voor het terugzenden van herstellde of vervangen producten worden door de fabriek betaald.

Deze garantie is niet van toepassing als de toestellen het voorwerp zijn geweest van verkeerd gebruik, onjuiste bedrading (niet de onze), foutieve installatie, of in gebruik werden genomen zonder rekening te houden met de instructies die wij hiervoor hebben gegeven of gerepareerd of gewijzigd werden door anderen dan de fabriek of de officiële vertegenwoordiger ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden het recht voor om onze toestellen ten allen tijde voor de levering geheel of gedeeltelijk aan te passen om verbeteringen aan te brengen die door het bedrijf als noodzakelijk worden beschouwd. Dit houdt niet in dat we ons ertoe zouden verbinden om vroeger geleverde toestellen te wijzigen of aan te passen of om nieuwe toestellen te leveren die voldoen aan vroegere specificaties.

Beschadigingen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de toestellen worden gemeld. Zichtbare schade aan de verpakking moet bij de levering op de ontvangstnota worden vermeld en bevestigd aan de producent.

Deze garantie vervangt nadrukkelijk alle andere expliciete of impliciete garanties. Wij gaan geen enkele verbintenis aan, en geven niemand de toestemming om voor ons een verbintenis aan te gaan, in verband met de verkoop of het gebruik van deze toestellen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor daaruit volgende of uitzonderlijke schade. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot toebehoren of onderdelen die niet door ons werden geleverd.

14. EG-verklaring van overeenstemming

CE

EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

Manufacturer / Fabrikant / Fabricant / Hersteller

Handi-Move NV - Ten Beukeboom 13 - B 9400 Ninove - Belgium

SRN (Single Registration Number): BE-MF-000016949

Name device **Handi-Move Wall Lift**
 Naam hulpmiddel **Handi-Move Wandlift**
 Nom dispositif **Handi-Move Soulève-personne Mural**
 Name Hilfsmittel **Handi-Move Wandlifter**
 Basic UDI-DI **54040166WL7Z**

Model numbers	220V - EU	220V - UK	220V - AUS	110V - USA
Electrical handcontrol Elektrische handbediening Commande manuelle électrique Elektrische handsteuerung	2420	2421	2423	2422
Pneumatic handcontrol Pneumatische handbediening Commande manuelle pneum Pneumatische Handsteuerung	2430	2431	2433	2432

Classification MDR **Class I (rule 1 + 13, MDR2017/745 annex VIII)**

Harmonised standards applied / Geharmoniseerde normen toegepast
Normes harmonisées appliquées / Harmonisierte Standards angewendet

EN ISO 10535:2006 ; EN 60601-1:2006/A1:2013 ;
 EN ISO 15223-1:2021 ; EN ISO 14971:2019/A11:2021

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Handi-Move NV. The devices covered by the present EU declaration are in conformity with the Medical Devices Regulation MDR 2017/745 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Handi-Move NV. De toestellen die onder deze EU-verklaring vallen, zijn in overeenstemming met de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Handi-Move NV. Les dispositifs couverts par la présente déclaration UE sont conformes au Règlement sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et la Directive RoHS 2011/65/UE.

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Handi-Move NV ausgestellt. Die von dieser EU-Erklärung erfassten Geräte entsprechen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Stefan Van Raemdonck bvba
 Director Handi-Move international
 Ninove, 27-04-2023