

Mobiele Tillift 2600/2610



Snelstartgids





Deze snelstartgids helpt met de functionele aspecten van de mobiele tillift maar is geen vervanging voor het lezen en begrijpen van de gebruikers-handleiding.

Bediening

De tillift wordt bediend door de druktoetsen op de handbediening of via het bedieningsklavier op de bedieningskast.

-  Hefarm omhoog
-  Hefarm omlaag
-  Onderstel dicht
-  Onderstel open
-  kanteljuk naar lig (enkel bij 2610)
-  kanteljuk naar zit (enkel bij 2610)

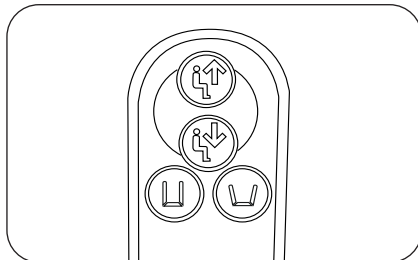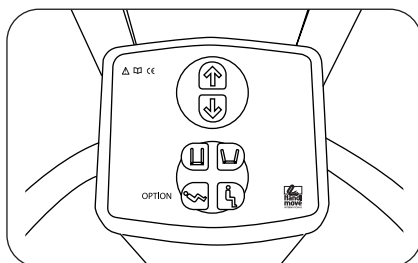


De tillift operationeel maken

Om de tillift aan te schakelen drukt u de groene knop op de bedieningskast in, om hem uit te schakelen de rode knop.

De rode knop doet tegelijkertijd dienst als nood-schakelaar.

Pas wanneer de groene knop is ingedrukt en de opgeladen batterijkast in de houder zit, zal de led van het bedieningsklavier oplichten en is de tillift operationeel.

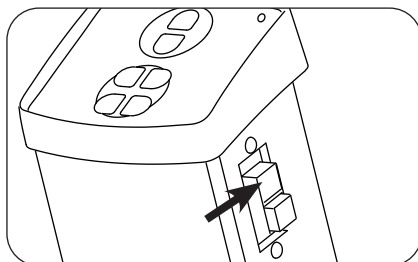

De batterijkast plaatsen

Bij de plaatsing van de batterijkast moet u er goed op letten dat het geleidingsblokje aan de achterzijde van de batterijkast in de geleidingsgleuf schuift en dat de batterijkast over de positioneerpennen wordt geplaatst.


Laden van de batterijen

Laad de batterijen dagelijks op. De automatische lader maakt overladen onmogelijk.

Opladen kan ofwel via een wandlader (A) ofwel kan u rechtstreeks de lader aansluiten op de batterijkast (B) en op het net (230 V).

Het verklikkerlichtje van de lader geeft volgende functies weer:

- Oranje/geel : batterijen worden geladen
- Groen : batterijen zijn volledig opgeladen

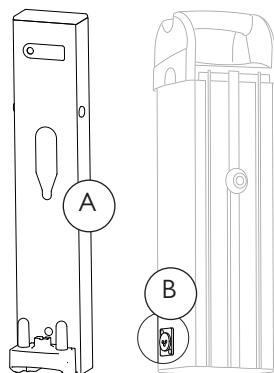

OPMERKING



ALS DE LIFT EEN GELUIDSSIGNAAL GEEFT DAN MOETEN DE BATTERIJEN DRINGEND WORDEN OPGELADEN.

GEbruik DE LIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

Nooddaling

De lift beschikt over een mechanische nooddaling. Deze mag enkel gebruikt worden in noodsituaties en ze bevindt zich achter de batterijkast in de mast.

Verwijder de batterijkast en druk met een puntig voorwerp (zoals bv. een balpen) op de knop van de nooddaling.

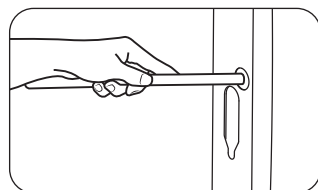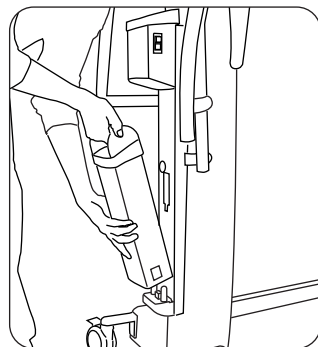

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove - België
Tel + 32 54 31 97 10
info@handimove.com
www.handimove.com