

Draagbare Plafondlift 2840-2845

Snelstartgids



Deze snelstartgids helpt met de functionele aspecten van de Draagbare Plafondlift maar is geen vervanging voor het lezen en begrijpen van de gebruikershandleiding.

Bediening

De Draagbare Plafondlift wordt bediend door middel van de druktoetsen op de handbediening of via de drukknoppen op het toestel.

Druktoetsen op de handbediening



(Sluit de handbediening aan op het toestel: H)



Omhoog knop



Omlaag knop

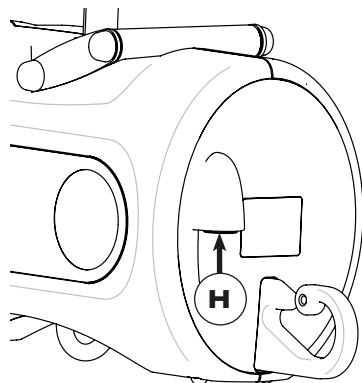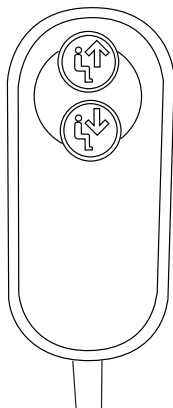

Drukknoppen op het toestel



Omhoog knop




Omlaag knop

Hoofd-/noodschakelaar



Om de motor aan te schakelen zet u deze knop in de I- stand, om de motor uit te schakelen, in de O- stand. De schakelaar functioneert tegelijkertijd als noodstopknop.

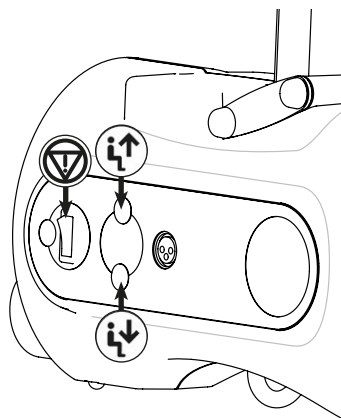

Laden van de batterijen

Sluit de lader aan op de connector voor de lader van de Draagbare Plafondlift en op het net. (110/240 Vac)

Het verklikkerlicht van de lader geeft volgende functie weer:

Oranje/geel : batterijen worden geladen


Groen : batterijen zijn volledig opgeladen

Als de Draagbare Plafondlift een geluidssignaal geeft, moeten de batterijen dringend worden opgeladen.




Let op!

Gebruik de Draagbare Plafondlift niet tijdens het opladen.

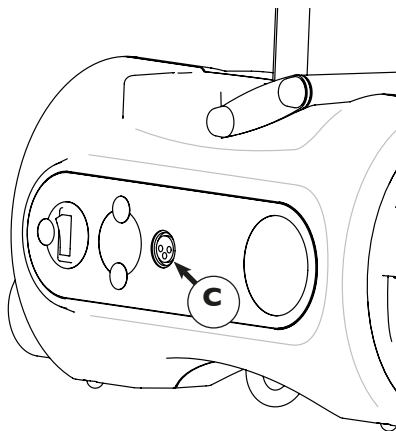

Nooddaling

Door op deze knop te drukken laat u het toestel zakken in geval van nood (b.v. als de bedieningen niet meer werken).

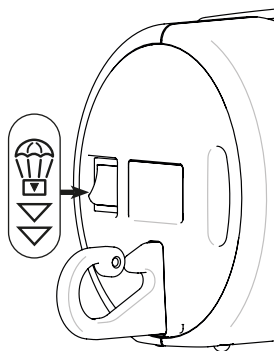

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove - België
Tel + 32 54 31 97 10
info@handimove.com
www.handimove.com