


HANDI-MOVE

TARZAN SYSTEEM

ADDENDUM HANDLEIDING MODEL 2840-2845

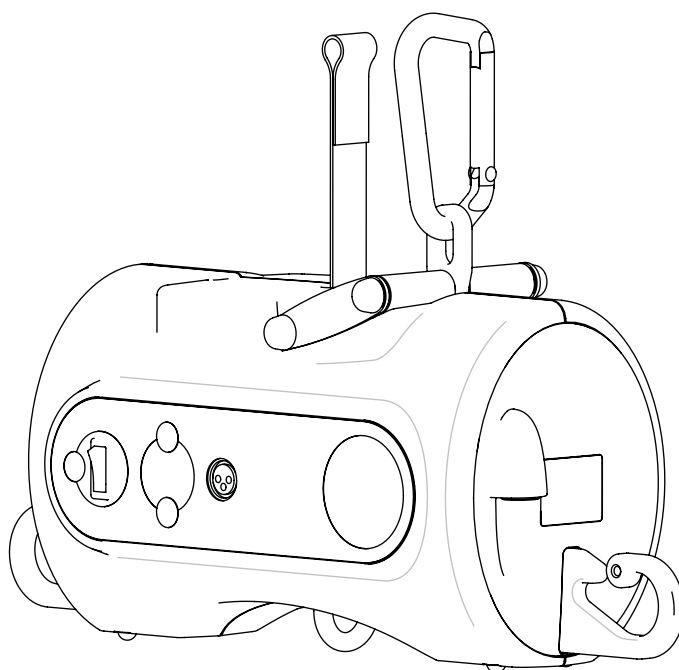

**Lees deze handleiding grondig voor gebruik.
Laat uw tilsysteem jaarlijks inspecteren. Zie deze handleiding voor meer informatie.**

Inhoud

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Toepassingsgebied	4
3.	Productinformatie	5
4.	Montagevoorschriften.....	6
5.	Met de draagbare plafondlift door een deuropening	7
6.	Onderdelenlijst.....	9
7.	Inspectie.....	10
	7.1. Inspectie door de gebruiker (voor elk gebruik)	10
8.	Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie	11
9.	Garantie	12


1. Veiligheidsvoorschriften

Definities:

- De gebruiker: persoon die gebruik maakt van het toestel, bv. de verzorger, een familielid, de rolstoelgebruiker zelf,...
- De verantwoordelijke: de persoon die verantwoordelijk is voor correct gebruik en het in goede staat houden van het toestel.

Alvorens het toestel te gebruiken, vergewis u ervan dat:

- Deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van de Draagbare Plafondlift 2840-2845 aandachtig werden doorgenomen en begrepen.
- Maak enkel gebruik van de karabijnhaken, NIET van een reikstok.

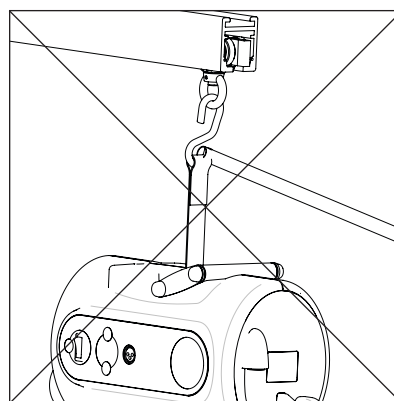


- Blijf ten allen tijde bij de gebruiker gedurende de transfer en vermijd ongecontroleerd slingeren van de gebruiker.
- Controleer steeds of de karabijnhaken goed gesloten zijn.
- Bij gebruik van een tilbeugel moet u een veiligheidsriem gebruiken.
- Controleer voor ieder gebruik de stiksels, lussen, aanhechting van de lussen van het multilooplint op mogelijke slijtage/schade. Bij het vaststellen van slijtage/schade, het multilooplint direct buiten gebruik stellen en vervangen.



LET OP!

LET EROP DAT HET MULTILOOPLINT NIET ONDERSTEBOVEN WORDT OPGEHANGEN.

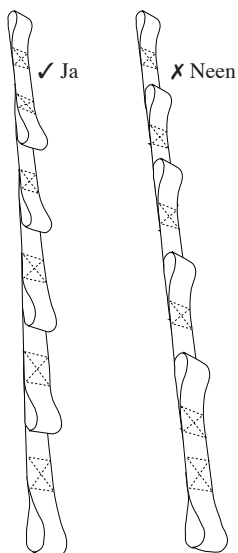

2. Toepassingsgebied


De Tarzan systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, geriatische centra, verzorgingstehuizen, dagcentra en privé-woningen. Transfers gebeuren van of naar een bed, ligstoel, rolstoel, bad, toilet enz.

De afstand tussen de rail en de bevestigingshaak bedraagt slechts 36 cm.

3. Productinformatie

In deze handleiding wordt verwezen naar de volgende onderdelen van uw Tarzan systeem:

- A** rail
- B** roller
- C** karabijnhaak
- D** multiloop lint
- E** lint
- F** handvat met oogring

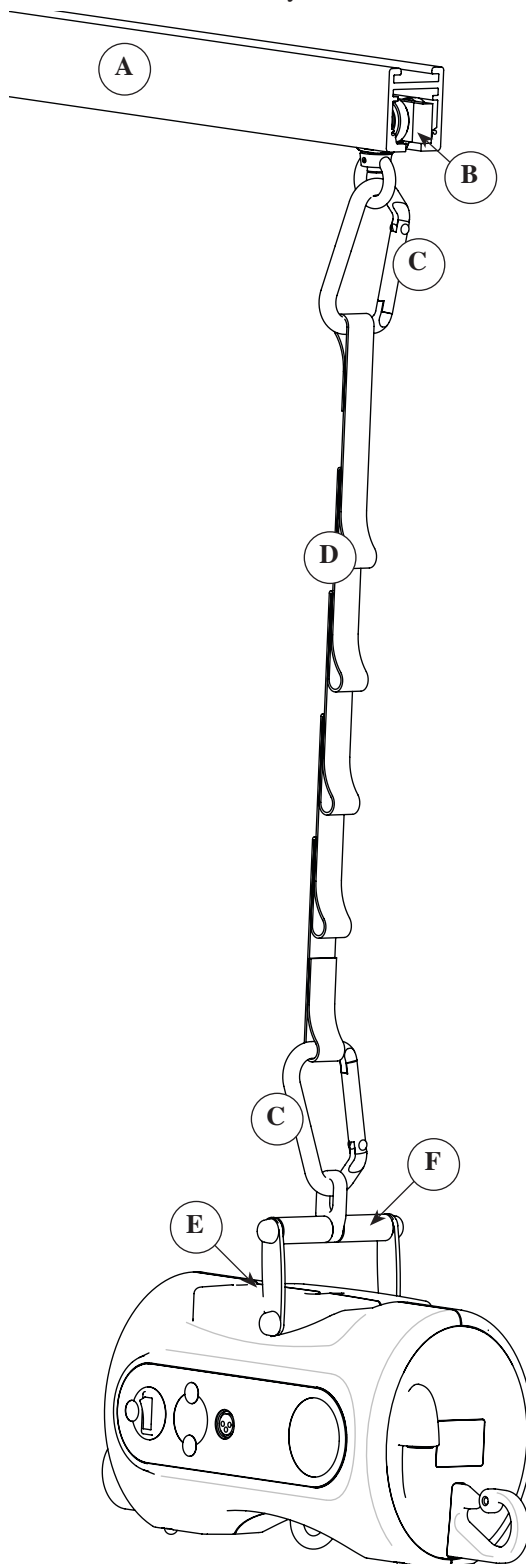


4. Montagevoorschriften

- stap 1. Zorg ervoor dat er een roller in de rail voorzien is. (Die kan geplaatst worden door het wegneembaar stuk los te maken en er een roller in te plaatsen, of via de railstop).
- stap 2. De roller wordt het best door een bevoegd persoon geplaatst.
- stap 3. In de kamer waar men de persoon optilt moet de roller voorzien zijn van een multiloop lint. De bevestiging aan de roller gebeurt d.m.v. een karabijnhaak. De draagbare plafondlift wordt d.m.v. een karabijnhaak aan het multiloop lint gehangen.
- stap 4. In de kamer waar we naartoe willen moet de roller eveneens worden voorzien van een multilooplint. Hiervoor gebruiken we ook een karabijnhaak. Voorzie tevens een karabijnhaak aan het handvat van de draagbare plafondlift.
- stap 5. Hang het toestel aan één van de lussen van het multilooplint d.m.v. de karabijnhaak aan het handvat. Welke lus u gebruikt is eveneens afhankelijk van de hoogte van de kamer en de lengte van de verzorger.

5. Met de draagbare plafondlift door een deuropening

Volg deze stappen:

- stap 1. Verplaats het toestel en de opgetilde persoon naar de deuropening
- stap 2. Breng de roller van de andere kamer bij de deuropening. Verbind het multiloop lint met het handvat van de draagbare plafondlift.
- stap 3. Laat de draagbare plafondlift zakken, zodat dit lint het gewicht van de gebruiker overneemt. Op deze manier wordt de gebruiker onder de deuropening getransfereerd.
- stap 4. Rol het lint van de draagbare plafondlift zo ver uit tot er geen gewicht meer wordt gedragen. Wanneer de spanning op het lint verdwenen is, treedt het veiligheidsmechanisme in werking, en zal het lint niet verder uitrollen. Om dit te vermijden dient u manueel spanning op het lint te zetten. Nu rust het gehele gewicht op het multilooplint in de andere kamer.
- stap 5. U kunt nu veilig het lint van de draagbare plafondlift losmaken en het met de karabijnhaak eveneens aan het multilooplint van de tweede kamer bevestigen. Eens dit is gebeurd, kunt u de draagbare plafondlift weer doen stijgen.
- stap 6. De draagbare plafondlift hangt nu weer op de gewenste hoogte. De gebruiker bevindt zich in de tweede kamer. U kunt nu de karabijnhaak van het handvat los maken

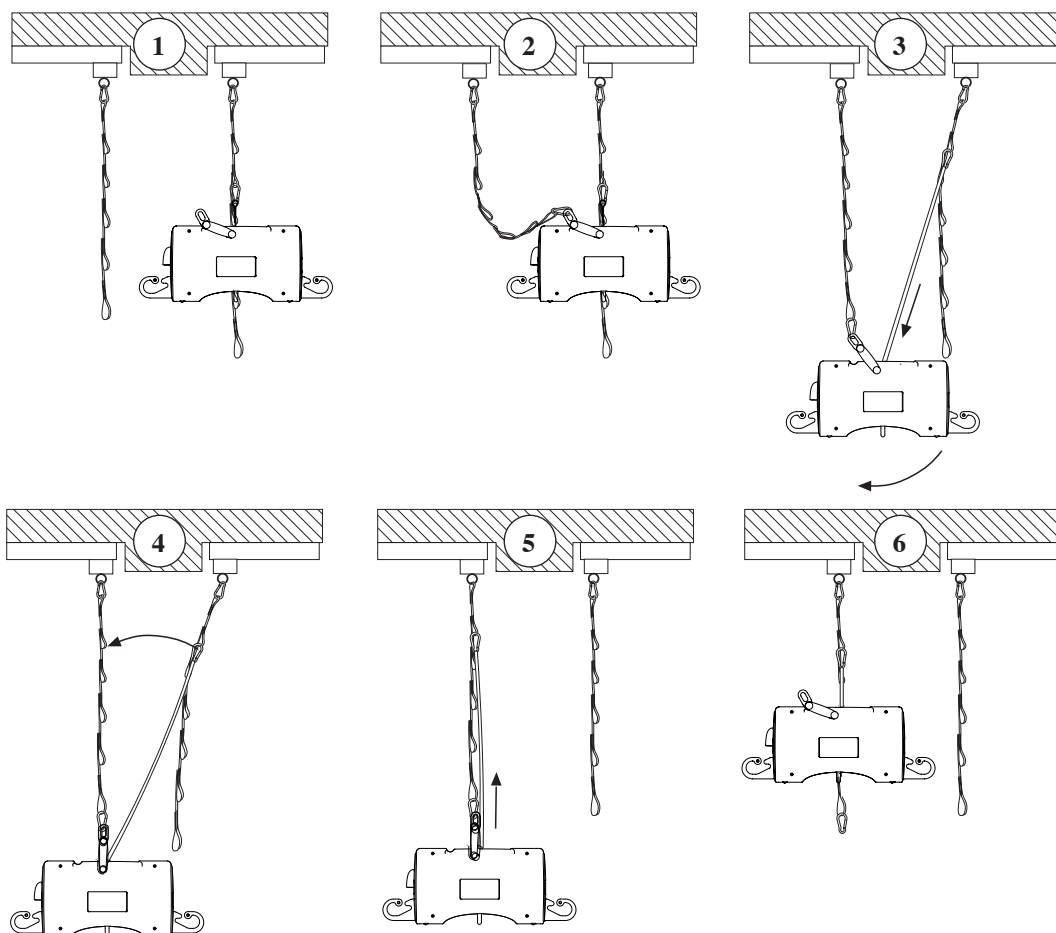



LET OP!

BLIJF TEN ALLEN TIJDE BIJ DE GEBRUIKER GEDURENDE DE TRANSFER EN VERMIJD ONGECONTROLEERD SLINGEREN VAN DE GEBRUIKER.

MAAK ENKEL GEBRUIK VAN DE KARABIJNHAKEN, NIET VAN EEN REIKSTOK

CONTROLEER STEEDS OF DE KARABIJNHAKEN GOED GESLOTEN ZIJN.

BIJ GEBRUIK VAN EEN TILBEUGEL MOET U EEN VEILIGHEIDSRIEM (BV. ART. NR. 1065) GEBRUIKEN.

CONTROLEER OF HET MULTILOOPLINT IN DE JUISTE RICHTING HANGT

6. Onderdelenlijst

art. 2544 0020	multiloop lint
art. 2544 0060	karabijnhaak Omega
art. 2544	Tarzan-feature voor extra rail

7. Inspectie

7.1. Inspectie door de gebruiker (voor elk gebruik)

- Controleer voor ieder gebruik de stiksels, lussen, aanhechting van de lussen van het multilooplint op mogelijke slijtage/schade. Bij het vaststellen van slijtage/schade, het multilooplint direct buiten gebruik stellen en vervangen.

8. Reserveonderdelen, onderhoud en jaarlijkse inspectie

Contacteer uw Handi-Move verdeler voor reserveonderdelen, onderhoud, jaarlijkse inspectie en vrijblijvende informatie.

Adres van een Handi-Move verdeler in uw buurt:

Handi-Move nv, Ten Beukeboom 13, 9400 Ninove

Tel + 32 54 31 97 10

E-mail: info@handimove.com

Website: www.handimove.com

9. Garantie

Deze uitrusting wordt verkocht onder een exclusieve garantie van 2 jaar vanaf verkoopdatum.

De producent garandeert dat de uitrusting vrij van gebreken is inzake materiaal en vakmanschap. Wij verklaren dat we alle producten, of onderdelen ervan, zullen herstellen of vervangen, die binnen de vermelde garantieperiode naar onze fabriek zijn teruggestuurd, en waarvan na onderzoek blijkt dat het product gebrekkig is. Dit geldt niet voor batterijen. De kosten voor het terugzenden van herstellende of vervangen producten worden door de fabriek betaald.

Deze garantie is niet van toepassing als de toestellen het voorwerp zijn geweest van verkeerd gebruik, onjuiste bedrading (niet de onze), foutieve installatie, of in gebruik werden genomen zonder rekening te houden met de instructies die wij hiervoor hebben gegeven of gerepareerd of gewijzigd werden door anderen dan de fabriek of de officiële vertegenwoordiger ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden het recht voor om onze toestellen ten allen tijde voor de levering geheel of gedeeltelijk aan te passen om verbeteringen aan te brengen die door het bedrijf als noodzakelijk worden beschouwd. Dit houdt niet in dat we ons ertoe zouden verbinden om vroeger geleverde toestellen te wijzigen of aan te passen of om nieuwe toestellen te leveren die voldoen aan vroegere specificaties.

Beschadigingen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de toestellen worden gemeld. Zichtbare schade aan de verpakking moet bij de levering op de ontvangstnota worden vermeld en bevestigd aan de producent.

Deze garantie vervangt nadrukkelijk alle andere expliciete of impliciete garanties. Wij gaan geen enkele verbintenis aan, en geven niemand de toestemming om voor ons een verbintenis aan te gaan, in verband met de verkoop of het gebruik van deze toestellen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor daaruit volgende of uitzonderlijke schade. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot toebehoren of onderdelen die niet door ons werden geleverd.